


Kontakt™ S / S+

Efficacia e prestazioni
per un risultato ottimale





Una soluzione su misura
per ogni caso clinico

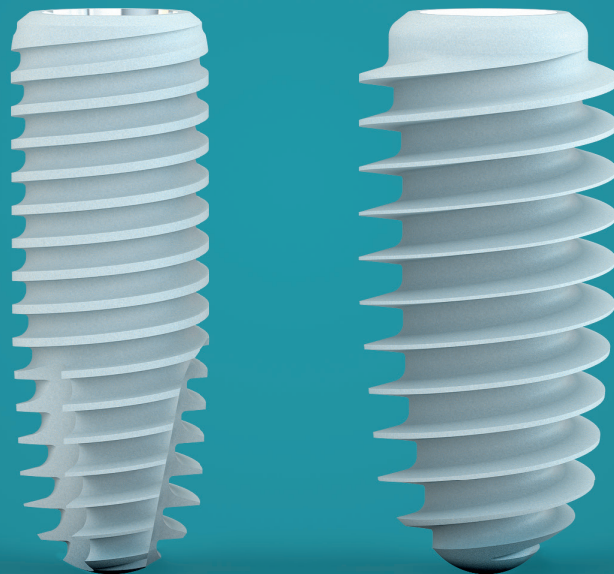

BIOTECH DENTAL

LA FORZA DI UNA GRANDE EREDITA' CLINICA

Ispirati dalla filosofia e dal successo dell'impianto di riferimento Kontakt™, gli impianti **Kontakt™ S** e **Kontakt™ S+** possiedono le stesse caratteristiche e i vantaggi che hanno costruito la sua reputazione.

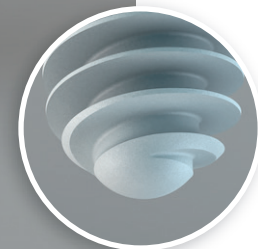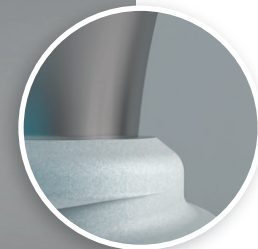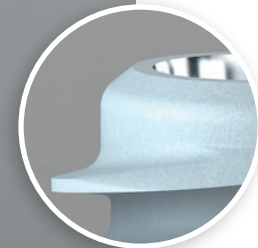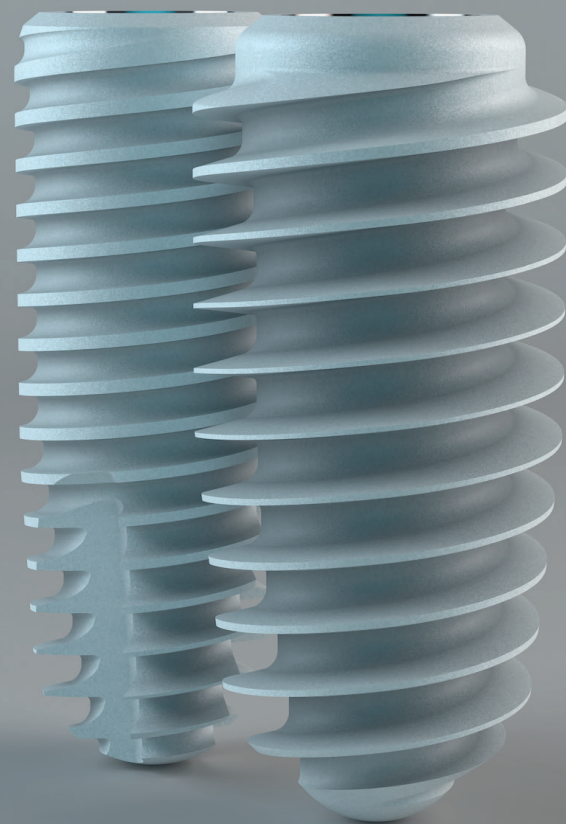

✓ Connessione ottimale

➤ Connessione di tipo Cone Morse (10°)

Permette una miglior impermeabilità alle infiltrazioni batteriche e una soppressione dei micromovimenti tra impianto e moncone, quindi la resistenza meccanica della connessione della coppia impianto-moncone risulta rinforzata.

➤ Indicizzazione STSystem®

Indicizzazione esalobata brevettata che permette sei posizioni

L'indicizzazione costituita da sei lobi nell'impianto e da tre lobi sul moncone permette un'inserzione sicura ed intuitiva della componentistica protesica.

✓ Collo dell'impianto ristretto, a chamfer e micro-strutturato

Il restringimento del collo permette di diminuire la compressione sull'osso corticale. Il chamfer microstrutturato favorisce la ritenzione di un coagulo sanguigno necessario alla formazione di osso.

✓ Platform switching

Il Platform switching, in sinergia con una connessione di tipo Cone Morse stabile e impermeabile ai batteri, è un fattore importante per la stabilità dei tessuti. Lo scopo è quello di limitare l'insorgenza di peri-implantiti.

✓ Apice sferico atraumatico

Protegge le strutture anatomiche durante l'intervento chirurgico e permette un'osteotomia meno invasiva.


2

SCEGLI IL TRATTAMENTO SU MISURA PER I TUOI PAZIENTI

Scegli la soluzione implantare ideale per ogni caso clinico.

GLI IMPIANTI KONTACT™ S E KONTACT™ S+ SONO REALIZZATI:

In **titanio puro di grado 4 (T60)**, la loro superficie trattata con sabbatura e mordenatura è stata studiata per ottimizzare la bagnabilità e favorire l'osteointegrazione.

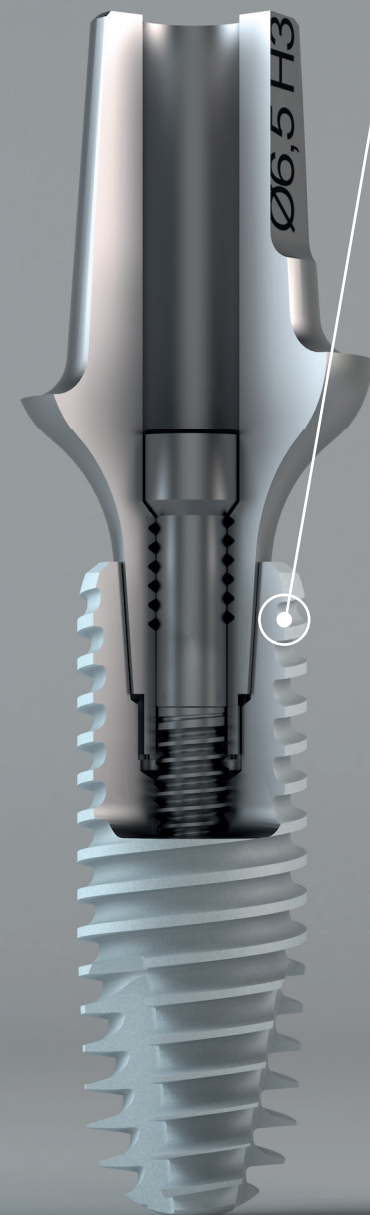


Kontakt™ S

Il profilo dell'impianto Kontakt™ S insieme alla sua filettatura smussata permette un **ancoraggio più progressivo nell'osso**.

La sua filettatura a spirale distanziata **permette di ridurre la forza di inserzione (coppia)**.

L'impianto Kontakt™ S è particolarmente indicato nei casi **di osso di elevata densità**.

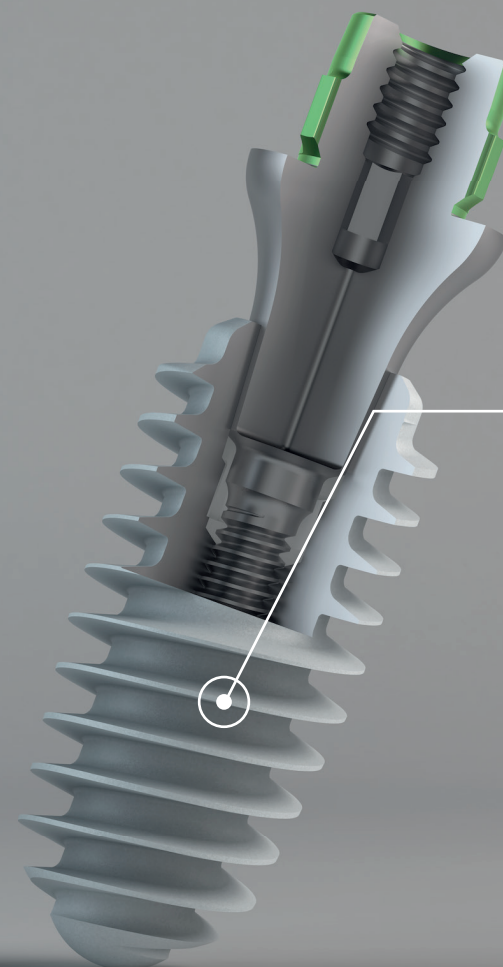

Kontakt™ S+

L'impianto Kontakt™ S+ è stato sviluppato in modo specifico per i **casi post-estrattivi immediati** e per i casi con **osso con scarsa densità**.

Grazie alle **spire taglienti larghe della filettatura che aumentano la superficie sviluppata**, il Kontakt™ S+ permette una condensazione ossea più efficace in un **osso con scarsa densità** e un **aumento della stabilità primaria** dell'impianto.

SISTEMA IMPLANTARE KONTACT™ SEMPLICE, PRATICO E PERFORMANTE



UN UNICO KIT PER TUTTI GLI IMPIANTI KONTACT™





- ✓ **Compatto** per un ingombro minimo ed una conservazione ottimale.
- ✓ **Visibile** grazie ad una marcatura colorata che permette un'identificazione rapida degli strumenti.
- ✓ **Pratico** con un'apertura semplice e rapida che facilita l'accesso agli strumenti.
- ✓ **Completamente smontabile** per una decontaminazione completa e autoclavabile.



UNA VASTA SCELTA DI SOLUZIONI PROTESICHE


- ✓ **Restauri singoli e multipli:** cementati, avvitati, telescopici.
- ✓ **Ancoraggio di protesi** tramite una gamma di monconi, Locator® e IsoPost.
- ✓ **Monconi personalizzati** grazie ad una gamma di Ti-Base e Scanbody e al nostro centro di fresaggio specializzato in CAD-CAM.

GAMMA DI IMPIANTI KONTACT™ S

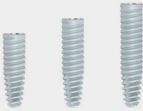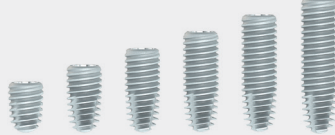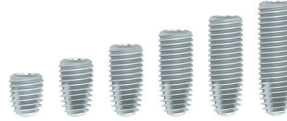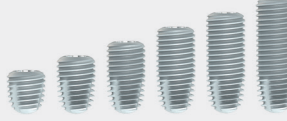	Codici	Descrizioni	Diametri	Lunghezze
	K3010S	Impianti	Ø 3 mm	10 mm
	K3012S			12 mm
	K3014S			14 mm
	K3608S	Impianti	Ø 3.6 mm	8 mm
	K3610S			10 mm
	K3612S			12 mm
	K3614S			14 mm
	K3616S*			16 mm
	K4206S	Impianti	Ø 4.2 mm	6 mm
	K4208S			8 mm
	K4210S			10 mm
	K4212S			12 mm
	K4214S			14 mm
	K4216S*			16 mm
	K4806S	Impianti	Ø 4.8 mm	6 mm
	K4808S			8 mm
	K4810S			10 mm
	K4812S			12 mm
	K4814S			14 mm
	K5406S	Impianti	Ø 5.4 mm	6 mm
	K5408S			8 mm
	K5410S			10 mm
	K5412S			12 mm
	K5414S			14 mm

* Le frese e gli alesatori specifici per l'impianto di 16 mm di lunghezza non sono forniti con il kit chirurgico ma sono opzionali.

GAMMA DI IMPIANTI KONTACT™ S+

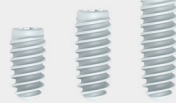	Codici	Descrizioni	Diametri esterni	Diametri del corpo	Lunghezze
	K4008-36S	Impianti	4 mm	3.6 mm	8 mm
	K4010-36S				10 mm
	K4012-36S				12 mm
	K4508-36S	Impianti	4.5 mm	3.6 mm	8 mm
	K4510-36S				10 mm
	K4512-36S				12 mm
	K4508-42S	Impianti	4.5 mm	4.2 mm	8 mm
	K4510-42S				10 mm
	K4512-42S				12 mm
	K5008-42S	Impianti	5 mm	4.2 mm	8 mm
	K5010-42S				10 mm
	K5012-42S				12 mm
	K5508-42S	Impianti	5.5 mm	4.2 mm	8 mm
	K5510-42S				10 mm
	K5512-42S				12 mm

NOTE

[illegible]

NOTE



BIOTECH DENTAL
ITALIA

Biotech Dental Italia
Viale degli olmi, 14
84 134 Salerno - Italia

Tel.: +39 089 9712629

Fax: +39 089 9712666

info@biotech-dental.it

www.biotech-dental.it



AFNOR Cert. 73017

Biotech Dental - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon-de-Provence, Francia.

S.A.S con capitale 24 866 417 € - RCS Salon de Provence: 795 001 304 - SIRET: 795 001 304 00018 - N° IVA: FR 31 79 500 13 04.

Kontakt™ S/S+: prodotto da: Biotech Dental. Dispositivi medicali di classe I, IIa e IIb destinati all'implantologia dentale. CE0459.

Kit chirurgico: Biotech Assemblatore dentale. Questo sistema è un insieme di dispositivi medici.

Leggere attentamente le istruzioni sul foglietto illustrativo. Non rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Immagini non contrattuali.

Smaltire con i rifiuti speciali. Stampa eseguita da VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas - Francia.