



OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DIGITALE

TI-BASES
CON CANALE DI ACCESSO ANGOLATO
&
ANALOGHI DIGITALI

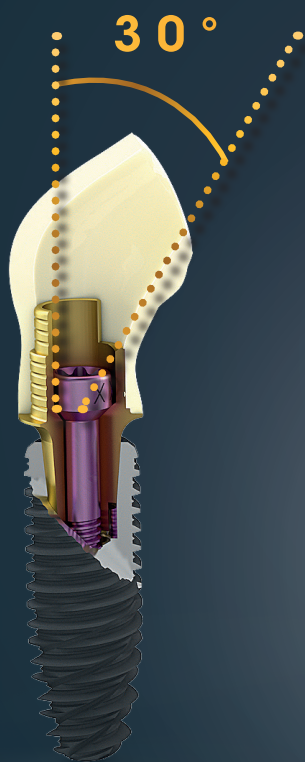

BIOTECH DENTAL
ITALIA

Disponibile per le gamme implantari Kontakt™, Kontakt™ N, Kontakt™ S e Kontakt™ S+, il Ti-Bases con canale d'accesso angolato permette di beneficiare dei **vantaggi della protesi avvitata** anche per i casi complessi e per le zone ad alto impatto estetico. Grazie al canale di accesso angolato il cacciavite può entrare nella testa della vite con un'inclinazione fino a 30° rispetto all'asse dell'impianto.

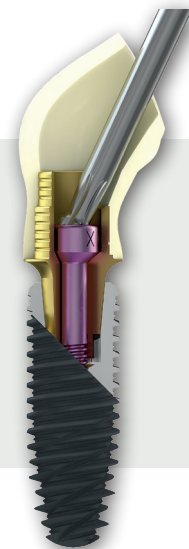

UNA GAMMA COMPLETA DI TI-BASES AD AVVITAMENTO ANGOLATO PER COMPENSARE L'INCLINAZIONE DELL'ASSE IMPLANTARE E MIGLIORARE L'ESTETICA

Una **doppia altezza** con un **taglio laterale** che permette l'ingresso della vite e del cacciavite

Superficie antirotazionale per evitare la rotazione della corona incollata

Accoppiamento perfetto della **componente protesica** con l'impianto grazie alla connessione STSystem®

Accesso per la vite angolato da **0° a 30°**

Scanalature esterne che assicurano una buona adesione del cemento


Ti-Base in **titanio di grado V anodizzato color oro** per migliorare l'estetica

- ✓ **3 altezze gengivali e 2 diametri delle piattaforme** per adattarsi ai diversi casi clinici (a seconda della profondità dell'impianto e dell'altezza dei tessuti molli)
- ✓ **Libreria CAD specifica***: 3shape, ExoCad, Dental Wings
- ✓ **Vite anodizzata** viola per semplificare l'identificazione
- ✓ Utilizzo di un cacciavite a testa sferica specifico utilizzabile su chiave dinamometrica o contrangolo
- ✓ Due protocolli di utilizzo possibile: **vite passante** o **vite prigioniera**

BIOTECH DENTAL DIGITAL : PROTESI MULTIPLA

Biotech Dental Digital garantisce il design e la produzione di qualunque tipo di protesi multipla in titanio e cromo cobalto**

- ✓ Disponibile direttamente sul moncone conico diametro 4 mm e 4.9 mm
- ✓ Procedimento di fabbricazione: fresatura e sinterizzazione o solo fresatura
- ✓ Vite specifica per moncone conico anodizzata viola
- ✓ Avvitamento angolato fino a 30° disponibile per qualunque tipo di protesi multipla: titanio e cromo-cobalto
- ✓ Libreria CAD specifica*: 3shape, ExoCad, Dental Wings

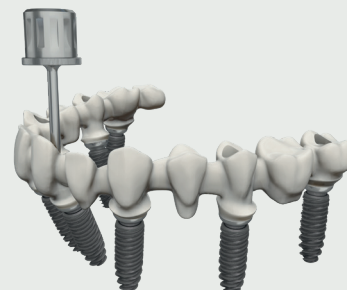

ANALOGO DIGITALE

Utilizzato come replica dell'impianto dentale inserito in un modello 3D, **l'analogo digitale riproduce la posizione esatta dell'impianto.**


Permette di **duplicare con precisione** il posizionamento, l'orientamento e la piattaforma protesica dell'impianto tramite le procedure CAD CAM.

Libreria CAD specifica*

Superficie curva per un alloggiamento preciso

Vite di fissaggio dell'analogo

Stabilizza e mantiene l'analogo nel suo alloggiamento

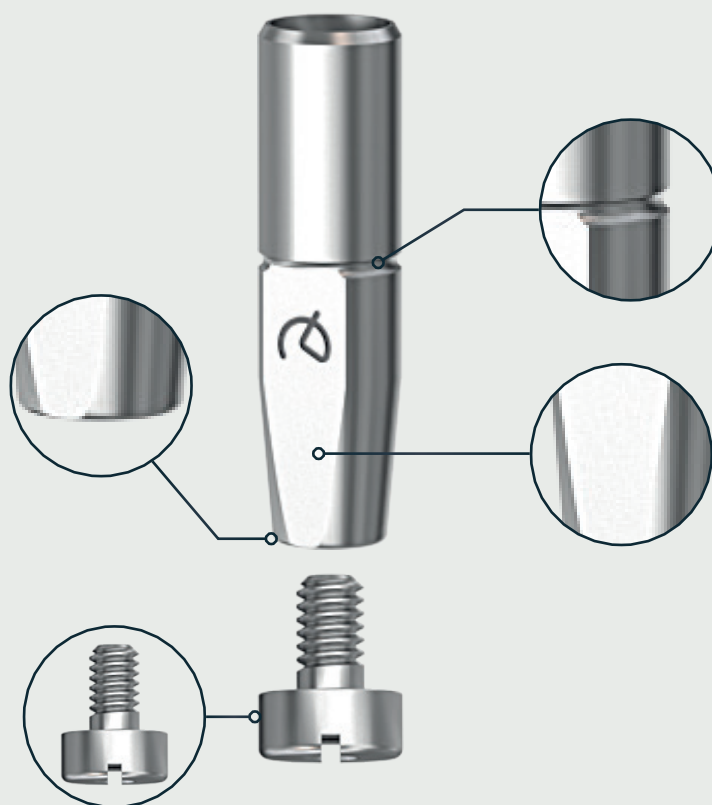

Scanalatura concava

Precisione elevata in posizione verticale

Superficie piana

Precisione dell'orientamento garantita

* Aggiornamento della libreria CAD necessario

** BDD : Biotech Dental Digital. Sezione specifica per il CAD CAM per soluzioni digitali al servizio della protesi su misura. www.biotech-dental-digital.com

LA GAMMA TI-BASES AD AVVITAMENTO ANGOLATO

	Codice	Descrizione	Ø mm	Alt. mm
	31_310_165_02-2G	Ti-Base dinamico non rotazionale XNP G1 Comp.0165	4	1
	31_310_165_03-2G	Ti-Base dinamico non rotazionale XNP G2 Comp.0165	4	2
	31_310_165_04-2G	Ti-Base dinamico non rotazionale XNP G3 Comp.0165	4	3
	31_313_165_02-2G	Ti-Base dinamico non rotazionale G1 Comp.016	5	1
	31_313_165_03-2G	Ti-Base dinamico non rotazionale G2 Comp.0165	5	2
	31_313_165_04-2G	Ti-Base dinamico non rotazionale G3 Comp.0165	5	3
	41_316_044_32-2G	Vite dinamica A2 M1.6 L4.4mm 20N.cm (per moncone conico Ø 4 mm)		
	41_314_039_32-2G	Vite dinamica A2 M1.4 L3.9mm 20N.cm (per moncone conico Ø 4.9 mm)		
	41_314_076_32-2G	Vite dinamica A2 M1.4 L7.6mm 20N.cm (per Ti-Base dinamico)		
	43_618_201_01-2G	Cacciavite dinamico ad avvitamento angolato L18mm. Fino a 30°		
	43_624_201_01-2G	Cacciavite dinamico ad avvitamento angolato L24mm. Fino a 30°		
	43_632_201_01-2G	Cacciavite dinamico ad avvitamento angolato L32mm. Fino a 30°		
	34_610_164_01-2G	Analogo digitale con vite Comp.0164 (per impianti Kontakt Ø 3 mm)		
	34_613_165_01-2G	Analogo digitale con vite Comp.0165 (per impianti Kontakt)		
	34_612_231_01-2G	Analogo digitale con vite Comp.0231 (per moncone conico stretto)		
	34_613_232_01-2G	Analogo digitale con vite Comp.0232 (per moncone conico Ø 4.9 mm)		