


Kontakt™ s / s+

- PROTOCOLLO D'USO -

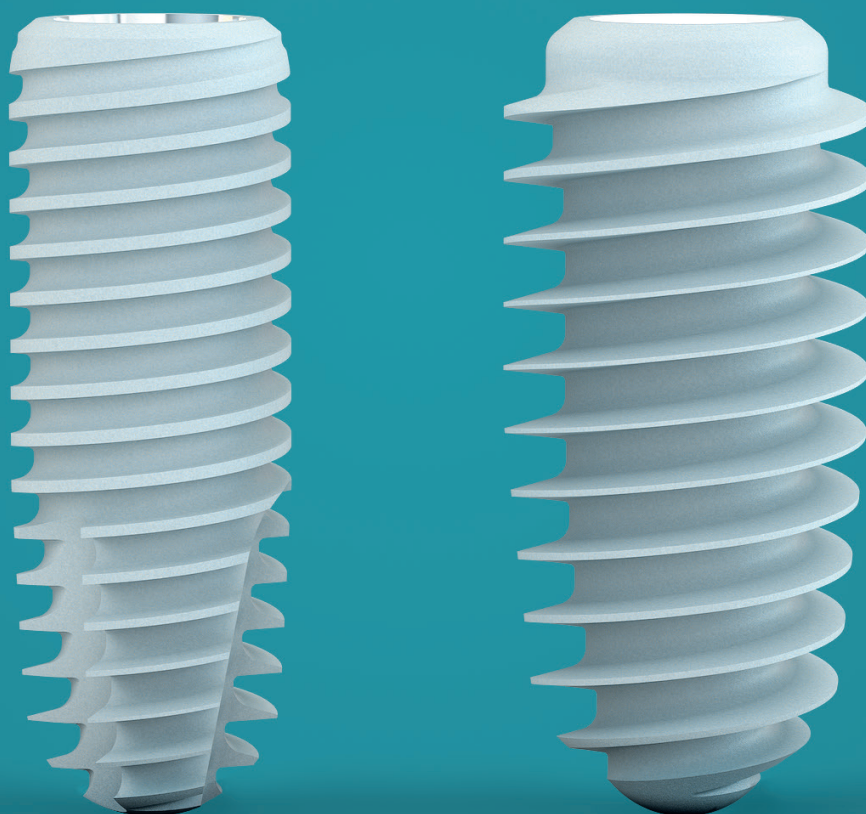

BIOTECH DENTAL

Indice


1. GLI IMPIANTI KONTACT™ S E KONTACT™ S+ p.4

1. Caratteristiche	p.5
Impianto Kontakt™ S	p.6
Impianto Kontakt™ S+	p.6
2. Connessione	p.8
Speciale diam. 3.0 mm	p.10
3. Studio dell'interfaccia moncone / Impianto	p.11
4. Studio della superficie	p.12
5. Packaging degli impianti	p.13
6. Codici degli impianti	p.14
Kontakt™ S	p.14
Kontakt™ S+	p.15

2. STRUMENTI p.16

1. Kit chirurgico	p.17
2. Protocollo chirurgico	p.22
Kontakt™ S	p.22
Kontakt™ S+	p.24
3. Kit di stop	p.27
4. Sonda tessuti parodontali / Viti di guarigione	p.28


3. INFORMAZIONI GENERALI p.30

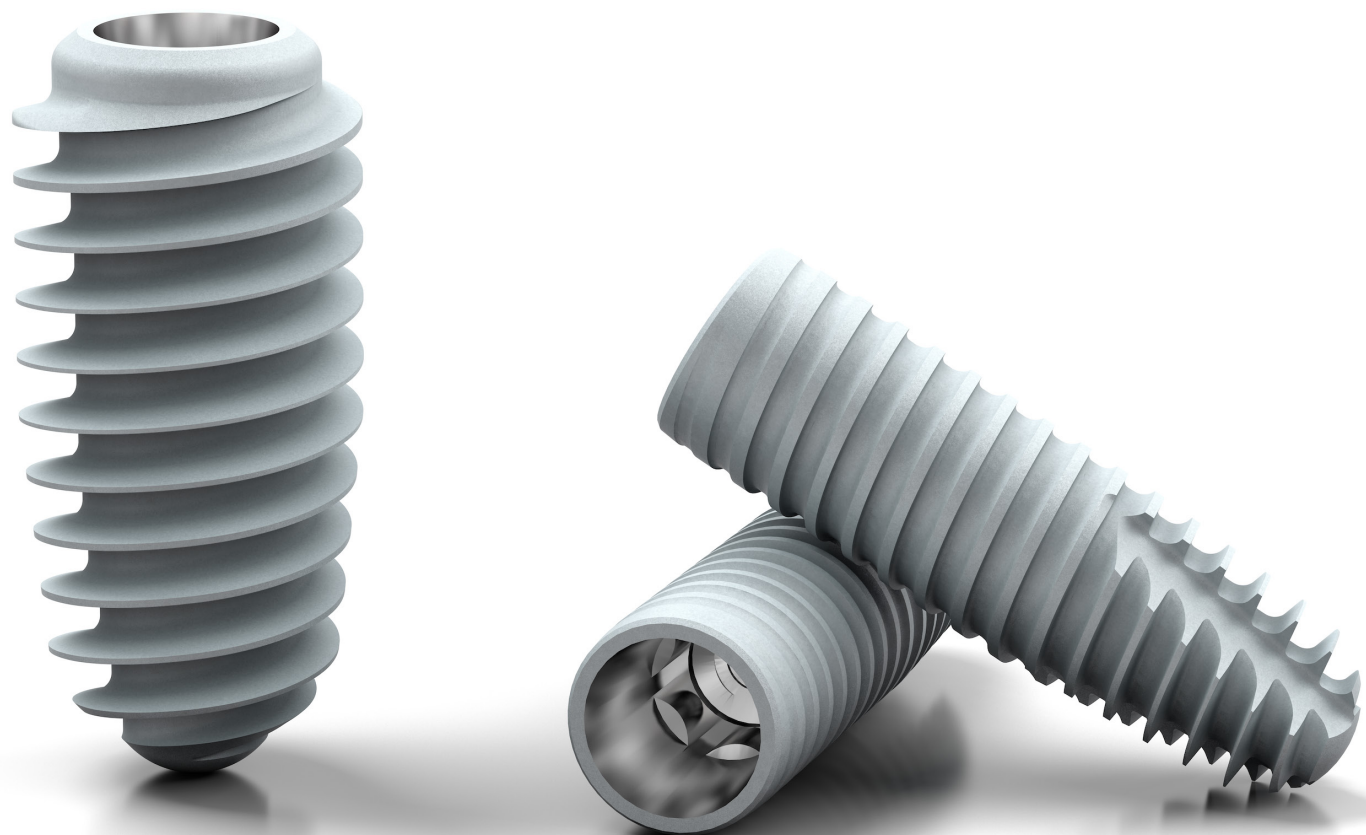

1. Caratteristiche

1

GLI IMPIANTI KONTACT™ S E KONTACT™ S+

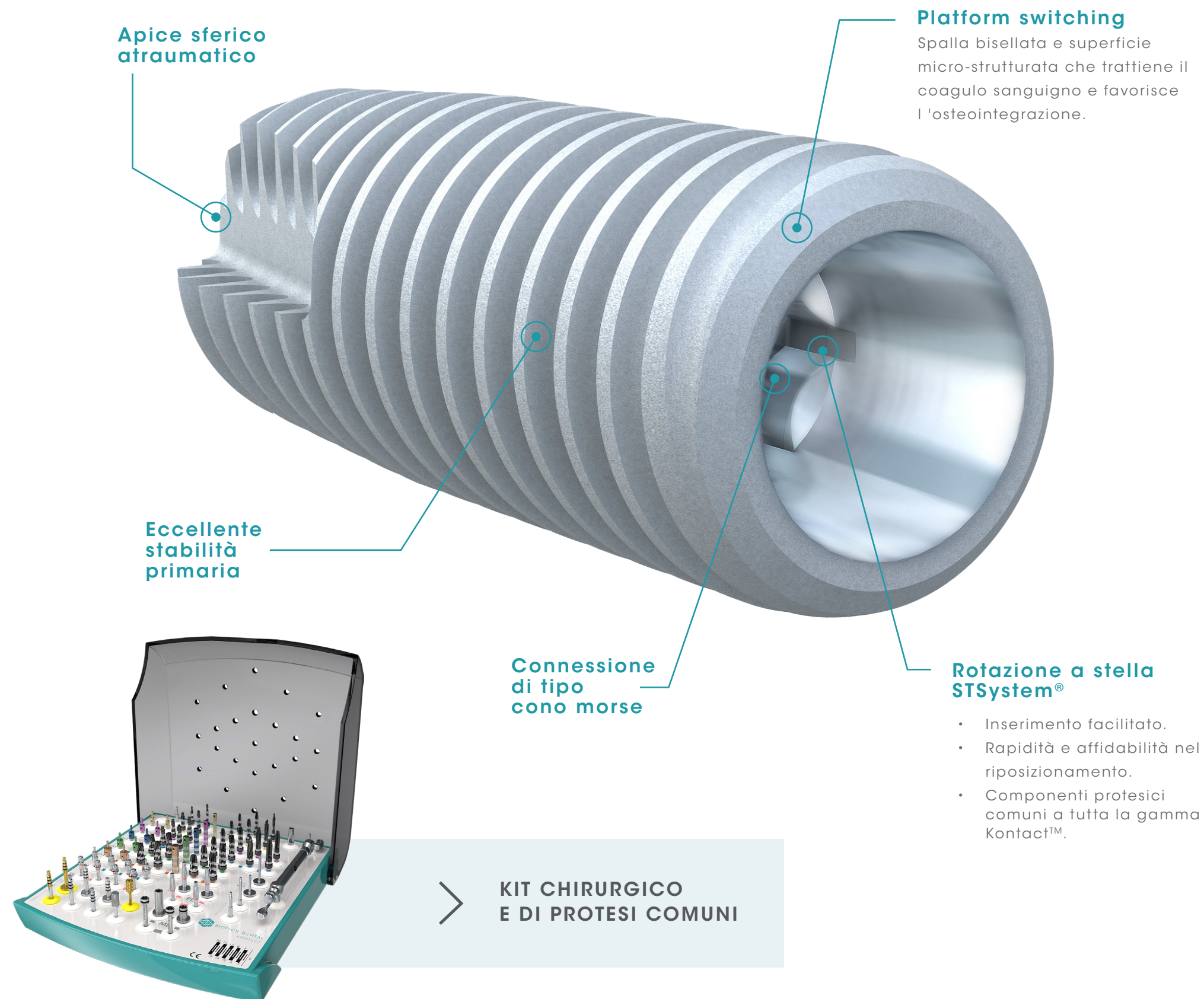

Impianto **KONTACT™ S**

Questo impianto adotta la filosofia di Kontakt™ e si distingue per l'evoluzione nella progettazione della filettatura e la scelta del materiale. Titanio di grado 4, la sua filettatura più morbida consente una penetrazione progressiva nell'osso. Il Kontakt™ S rappresenta quindi un'alternativa clinica più "soft"!

I vantaggi della riduzione della forza di inserimento (torque), dovuta alla filettatura progressiva, sono i seguenti:


- > **Un inserimento facilitato,**
- > **Di evitare una perdita ossea perimplantare, favorendo così la biologia ossea.**

Indicizzazione STSystem®

Per gli impianti di
Ø 3.6 - Ø 4.2 - Ø 4.8 e Ø 5.4 mm.



Vista dall'alto

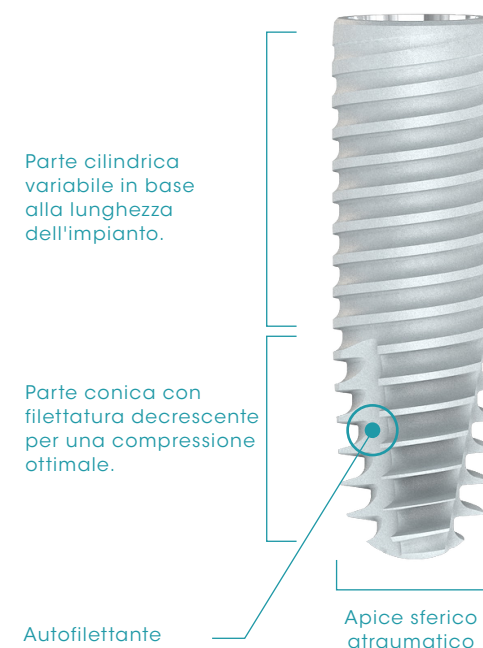

Impianto **KONTACT™ S+**

La filettatura ottimizzata dell'impianto Kontakt™ S+, evoluzione di quella del Kontakt™ S, permette di aumentare la stabilità primaria; quindi particolarmente indicato nei casi di impianto post - estrattivo e in presenza di osso di bassa densità.

Con la connessione identica a tutti gli impianti della gamma Kontakt™, ne è il complemento ideale.

Indicizzazione STSystem®

Per gli impianti di Ø esterno
4.0 - Ø 4.5 - Ø 5.0 e Ø 5.5 mm.



Vista dall'alto



✓ Impianti in **titanio di grado 4**: titanio puro

✓ Superficie sabbiata mordenzata


✓ Connessione brevettata STSystem®

✓ Comfort di foratura

✓ Utilizzo degli stessi kit e componenti protesici dell'impianto Kontakt™

2. Connessione



Connessione comune tra il Kontakt™ S e il Kontakt™ S+

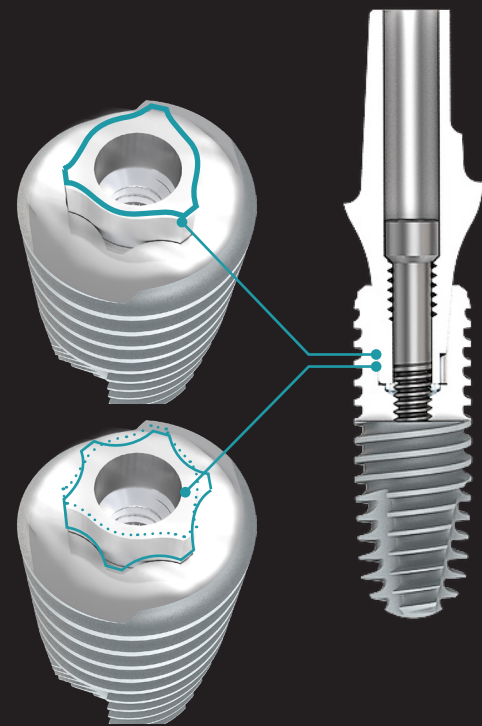

- ✓ Connessione resistente
- ✓ Ermeticità perfetta
- ✓ Inserimento facilitato
- ✓ Rapidità e affidabilità in sede di riposizionamento

Gli impianti Kontakt™ S e Kontakt™ S+ sono destinati a ricevere le protesi della gamma Kontakt™; la connessione identica a tutta la gamma permette una perfetta compatibilità con i monconi.

I monconi sono disponibili nella versione: **indicizzata e non indicizzata.**

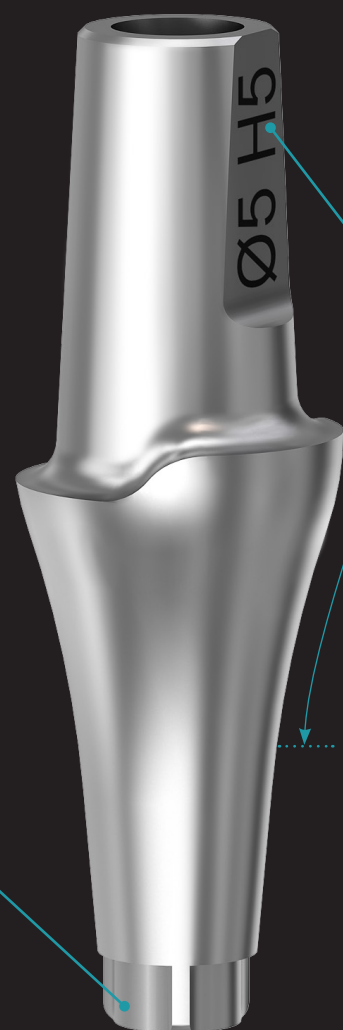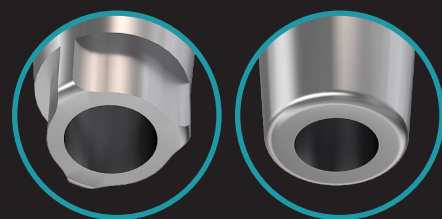

Tutti i nostri componenti protesici sono **incisi a laser** in funzione delle loro dimensioni.


Finitura a specchio

CONNESSIONE SIX-THREE SYSTEM® (STSystem®)

La gamma Kontakt™ S presenta un sistema di connessione tipo cono morse identico a quello del Kontakt™.

Tale sistema permette di stabilizzare l'accoppiamento moncone- impianto offrendo indubbi vantaggi di ordine meccanico:

- ✓ **Resistenza alla trazione e alla flessione: i componenti sono perfettamente bloccati,**
- ✓ **Assenza di micromovimenti, deformazione o rottura della vite.**

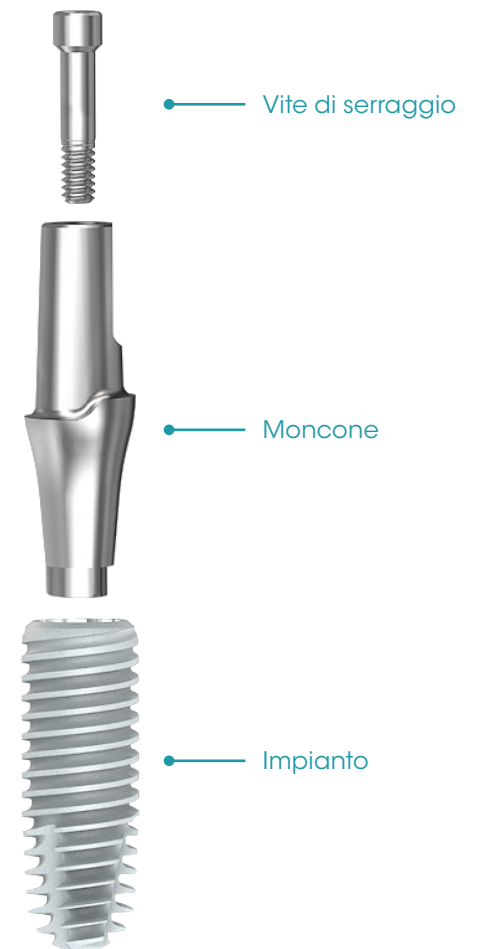

STUDIO PRECLINICO

Questo studio che ha valutato la qualità del sigillo ermetico tra la componente protesica e l'impianto ha permesso di evidenziare l'affidabilità del nostro sistema, dimostrando che la nostra connessione STS soddisfa tutti i criteri di sigillo richiesti (Studio N° 29J del 30/12/2013).

PLATFORM SWITCHING

Il principio del platform switching è l'utilizzo di **monconi protesici il cui diametro di emergenza è ridotto rispetto al diametro del collo dell'impianto**. Ciò consente di **favorire la stabilità ossea** (limitando il riassorbimento osseo perimplantare) nonché **la resa estetica**.



La gamma Kontakt™ S **garantisce la preservazione dei tessuti**. Infatti la combinazione della connessione di tipo cono morse e del principio del platform switching garantisce un **sigillo perfettamente impermeabile** allo sviluppo microbico e un accoppiamento **vite- moncone- impianto totalmente stabile, affidabile e durevole**.



SPECIALE DIAMETRO 3.0 MM*


Riguarda solo l'impianto **Kontakt™ S**.

Soltanto per una protesi singola, cementata o avvitata direttamente sull'impianto su Ti-Base.

> Caratteristiche dell'impianto

Diametro 3.0 mm

Connessione esagonale indicizzata con scanalature per impianto da Ø 3.0 mm.

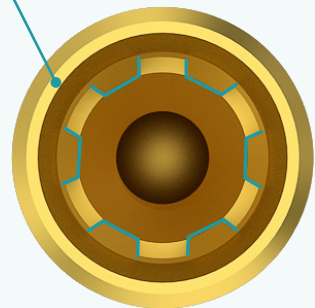

Vista della connessione dall'alto

Gli impianti da Ø 3.0 mm sono riservati agli spazi ridotti. Possono essere utilizzati per la sostituzione degli incisivi mandibolari e degli incisivi laterali mascellari.

> Nota

Per gli impianti da Ø 3.0 mm, utilizziamo la vite di copertura Rif. K30VRC. La vite di copertura alta Rif. K30VRCE viene fornita gratuitamente su richiesta. Le viti di copertura per impianto da Ø 3.0 mm sono di colore giallo.



> Attenzione



Pulire accuratamente l'interno dell'impianto prima di posizionare la vite di guarigione.



*Tutte le parti della gamma relative agli impianti da Ø 3.0 mm sono identificabili da punti gialli.


3. Studio dell'interfaccia moncone / Impianto

Identica per il Kontakt™ S e il Kontakt™ S+

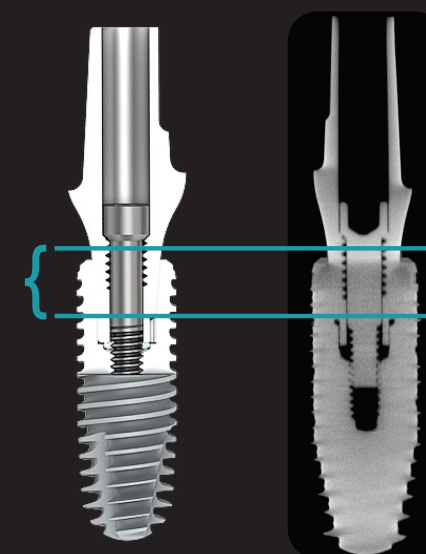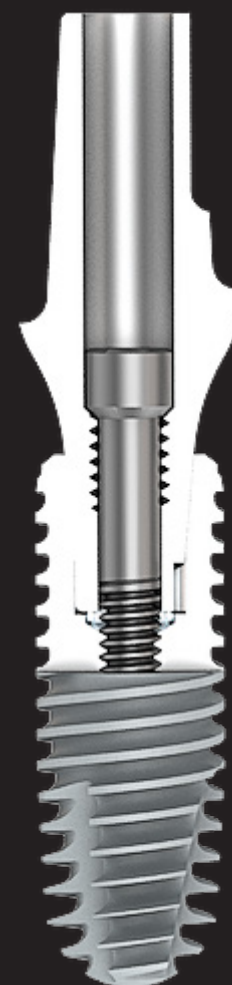

Interfaccia moncone / Impianto

DISPOSITIVO ASSEMBLATO

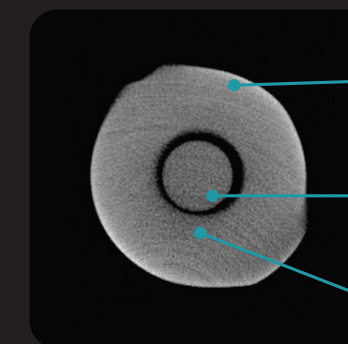

Impianto


Vite di fissaggio

Moncone


Illustrazione del sigillo moncone-impianto su tutta la circonferenza.

4. Studio della superficie

KONTACT™ S e KONTACT™ S+ in titanio di grado 4 con uno stato superficiale sabbiato mordenzato.

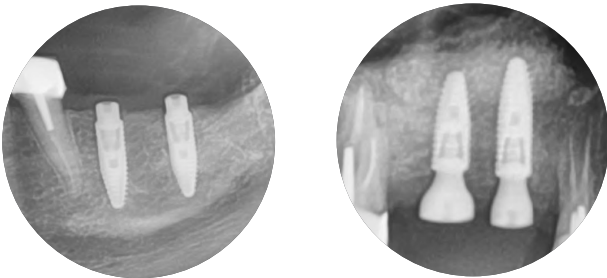

Struttura superficiale sabbiata mordenzata per una migliore apposizione ossea.

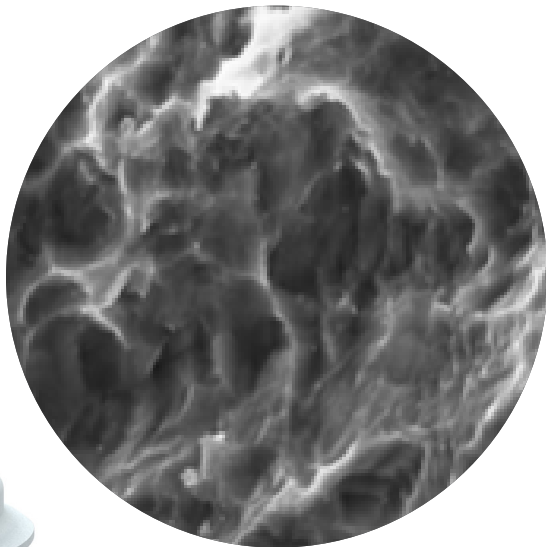

Vista dello studio dell'interfaccia x 2000



5. Packaging degli impianti

Caratteristiche del packaging


- ✓ Imballaggio esterno in cartone con doppia barriera sterile.
- ✓ Etichetta di tracciabilità che riporta tutte le informazioni relative all'impianto.
- ✓ Supporto dell'impianto stabile per l'appoggio su campo operatorio.
- ✓ Vite di copertura corta consegnata con l'impianto.
- ✓ Vite di copertura alta fornita gratuitamente su richiesta.
- ✓ Colletto e stop in titanio dai due lati dell'impianto per evitare il contatto con la plastica.
- ✓ Etichetta indicante le dimensioni dell'impianto sul supporto dell'impianto.

1



Imballaggio in cartone, chiuso da etichette d'inviolabilità.

2

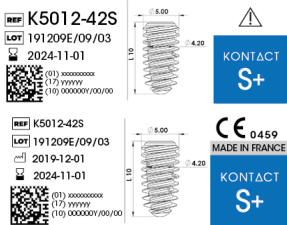

Etichetta di tracciabilità.

3



Blister sigillato contenente il supporto dell'impianto.


2ª barriera sterile

4






Supporto dell'impianto con seconda copertura.

1ª barriera sterile

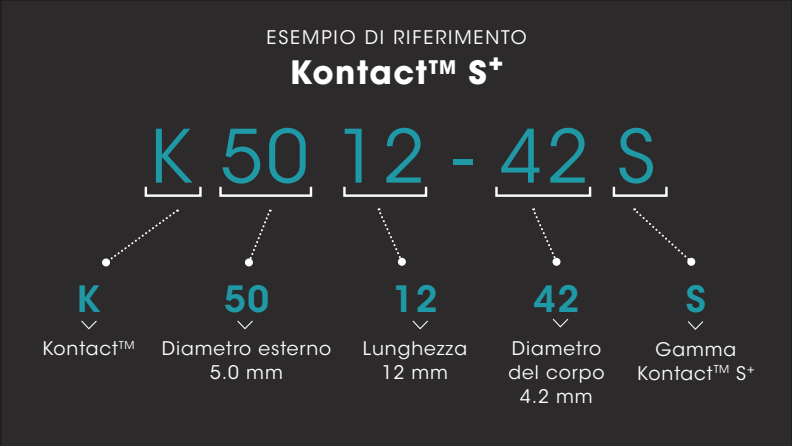


6. Codici degli impianti

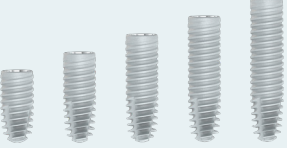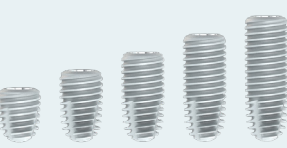KONTACT™ S	Codici	Diametri	Lunghezze	Colori
	K3010S	Ø 3.0 mm	10 mm	
	K3012S		12 mm	
	K3014S		14 mm	
	K3608S	Ø 3.6 mm	8 mm	
	K3610S		10 mm	
	K3612S		12 mm	
	K3614S		14 mm	
	K3616S*		16 mm	
	K4206S	Ø 4.2 mm	6 mm	
	K4208S		8 mm	
	K4210S		10 mm	
	K4212S		12 mm	
	K4214S		14 mm	
	K4216S*		16 mm	
	K4806S	Ø 4.8 mm	6 mm	
	K4808S		8 mm	
	K4810S		10 mm	
	K4812S		12 mm	
	K4814S		14 mm	
	K5406S	Ø 5.4 mm	6 mm	
	K5408S		8 mm	
	K5410S		10 mm	
	K5412S		12 mm	
	K5414S		14 mm	

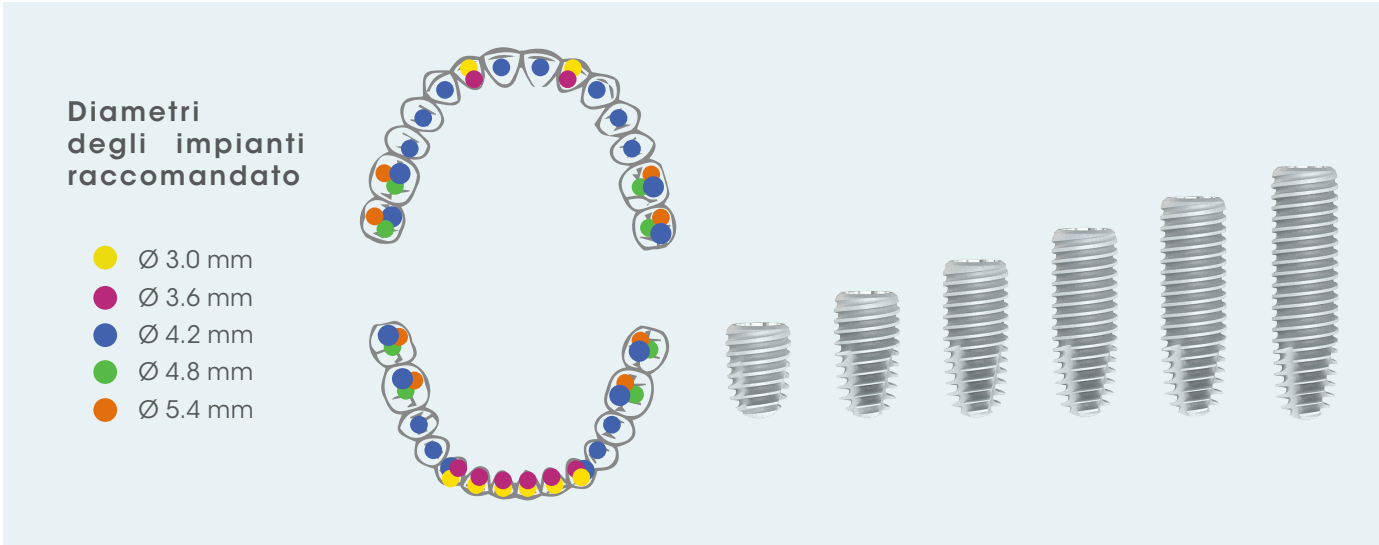

KONTACT™ S+	Codici	Diametri esterni	Diametri del corpo	Lunghezze	Colori
	K4008-36S	Ø 4.0 mm	Ø 3.6 mm	8 mm	
	K4010-36S			10 mm	
	K4012-36S			12 mm	
	K4508-36S	Ø 4.5 mm	Ø 3.6 mm	8 mm	
	K4510-36S			10 mm	
	K4512-36S			12 mm	
	K4508-42S	Ø 4.5 mm	Ø 4.2 mm	8 mm	
	K4510-42S			10 mm	
	K4512-42S			12 mm	
	K5008-42S	Ø 5.0 mm	Ø 4.2 mm	8 mm	
	K5010-42S			10 mm	
	K5012-42S			12 mm	
	K5508-42S	Ø 5.5 mm	Ø 4.2 mm	8 mm	
	K5510-42S			10 mm	
	K5512-42S			12 mm	

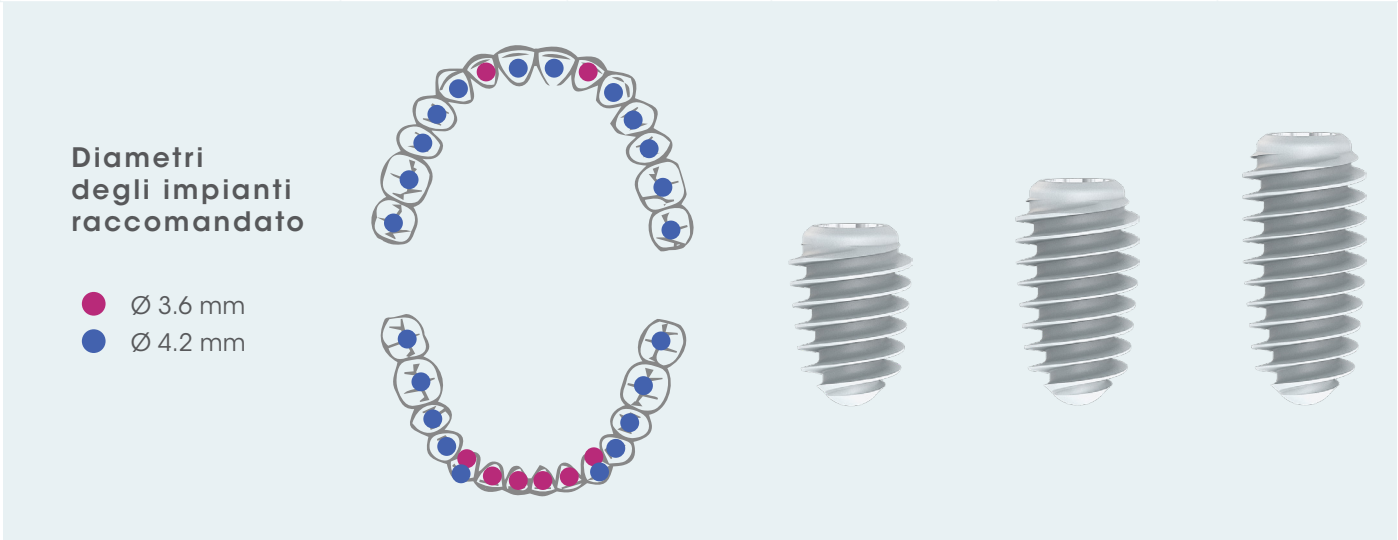

Gli impianti Kontakt™ S+ con un diametro del corpo di 3.6 mm sono utilizzati esclusivamente per il settore anteriore.

2

STRUMENTI


- 1 Prolunga per fresa
- 2 Estrattori per monconi
- 3 Cacciavite a contrangolo
- 4 Cacciaviti manuali / Chiave a cricchetto
- 5 Frese corticali Kontakt™ S +
- 6 Fresa iniziale Ø 1.5 mm
- 7 Frese pilota Ø 2 mm
- 8 Drives a contrangolo
- 9 Calibri di parallelismo
- 10 Frese
- 11 Alesatori
- 12 Drives
- 13 Chiave a cricchetto dinamometrica chirurgica

Opzionali


- 14 Distanziatore-parallelizzatore
- 15 Calibri di profondità
- 16 Frese e alesatori lunghezza 16 mm

1. Kit chirurgico

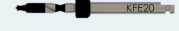

	Codici	Descrizioni	Diametri impianti	Lunghezze
	ESP	Distanziatore-parallelizzatore		
	K30EX	Estrattori per monconi	Ø 3.0 mm	Corto
	K30EXL			Lungo
	KEX	Estrattori per monconi	Tutti Ø	Corto
	KEXL			Lungo
	KEXV			
	1034	Fresa rosetta Ø 1.9 mm		
	1001SI	Fresa iniziale Ø 1.5 mm		
	KFT	Frese iniziali punta trocar		Corto
	KFTL			Lungo
	KFE20	Frese pilota Ø 2 mm		Corto
	KFE20L			Lungo
	KFE2016*			16 mm
	KFE3016*	Fresa		16 mm
	KJA30	Calibro di parallelismo	Ø 3.0 mm	
	KJA36	Calibri di parallelismo	Ø 3.6 mm	
	KJA42		Ø 4.2 mm	
	KJA48		Ø 4.8 mm	
	KJA54		Ø 5.4 mm	

 Opzionale





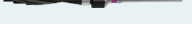
	Codici	Descrizioni	Diametri impianti	Lunghezze	Colori
	KFE30	Frese	Ø 3.0 mm	Corto	
	KFE30L			Lungo	
	KFE36	Frese	Ø 3.6 mm	Corto	
	KFE36L			Lungo	
	KFE3616*			16 mm	
	KFE42	Frese	Ø 4.2 mm	Corto	
	KFE42L			Lungo	
	KFE4216*			16 mm	
	KFE48	Frese	Ø 4.8 mm	Corto	
	KFE48L			Lungo	
	KFE54	Frese	Ø 5.4 mm	Corto	
	KFE54L			Lungo	
	KF30	Alesatori	Ø 3.0 mm	Corto	
	KF30L			Lungo	
	KF36	Alesatori	Ø 3.6 mm	Corto	
	KF36L			Lungo	
	KF3616*			16 mm	
	KF42	Alesatori	Ø 4.2 mm	Corto	
	KF42L			Lungo	
	KF4216*			16 mm	
	KF48	Alesatori	Ø 4.8 mm	Corto	
	KF48L			Lungo	
	KF54	Alesatori	Ø 5.4 mm	Corto	
	KF54L			Lungo	
	KFCS-40**	Frese corticali per Kontakt™ S+	Ø 4.0 mm		
	KFCS-45**		Ø 4.5 mm		
	KFCS-50**		Ø 5.0 mm		
	KFCS-55**		Ø 5.5 mm		

 Opzionale

* Le frese e gli alesatori da 16 mm non sono forniti con il kit chirurgico ma sono opzionali.

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** Le frese per impianto non sono fornite con il kit chirurgico ma sono opzionali.

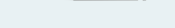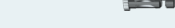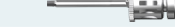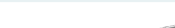


	Codici	Descrizioni	Diametri impianti	Lunghezze
	K30MPICA	Drives per contrangolo	Ø 3.0 mm	
	KMPICAC	Drives per contrangolo	Autres Ø	Corto
	KMPICAL			Lungo
	KMPICAXL			Extra lungo
	K30MPI	Drives manuale	Ø 3.0 mm	
	KMPIC	Drives manuali	Autres Ø	Corto
	KMPIL			Lungo
	KMPIXL			Extra lungo
	TCAS	Cacciavite per contrangolo		Corto
	TCA			Standard
	TCAL			Lungo
	1028	Prolunga fresa		
	1032S	Cacciaviti manuali		Corto
	1032			Standard
	1032L			Lungo
	KAIP	Chiave guida IsoPost		
	KCCD	Chiave a cricchetto dinamometrica chirurgica		
	KCCDL	Chiave a cricchetto dinamometrica chirurgica a sgancio rapido		
	KJP30	Calibro di profondità foratura terminale	Ø 3.0 mm	
	KJP36	Calibri di profondità foratura terminale	Ø 3.6 mm	
	KJP42		Ø 4.2 mm	
	KJP48		Ø 4.8 mm	
	KJP54		Ø 5.4 mm	

 Opzionale

ESTRAZIONE DELL'IMPIANTO



La rimozione di un impianto richiede una punta per estrazione.
Esiste una punta per ciascun diametro d'impianto Kontakt™ S e Kontakt™ S+.
Velocità di utilizzo raccomandata: da 500 a 800 giri al minuto con irrigazione.

	Codici	Denominazione	Ø Interno	Ø Esterno	Lg. max interna
	KTEI30	Punta per estrazione dell'impianto Kontakt™ S e Kontakt™ S+	3.4 mm	4.0 mm	18 mm
	KTEI36		4 mm	4.6 mm	
	KTEI42		4.6 mm	5.2 mm	
	KTEI48		5.2 mm	5.8 mm	
	KTEI54		5.8 mm	6.4 mm	

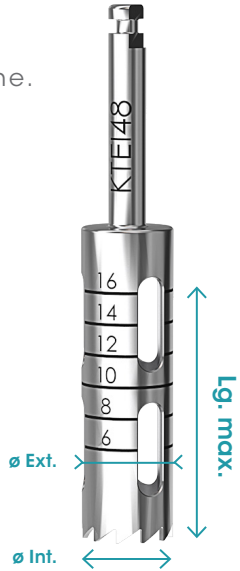

FRESE CORTICALI CON GUIDA NELL'IMPIANTO


Fresa corticale per viti di guarigione e moncone.
La fresa corticale consente di rimuovere, se necessario, l'eccesso di osso corticale sovraimplantare.

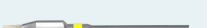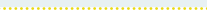	Codici	Descrizioni	Diametri componenti protesici
	KFC30	Fresa corticale per viti di guarigione	Ø 3.0 mm
	KFC4-5	Frese corticali standard per viti di guarigione	Ø 4.0 mm - Ø 5.0 mm
	KFC65		Ø 6.5 mm

Velocità di utilizzo raccomandata: 200 giri al minuto.

2. Protocollo chirurgico

KONTACT™ S

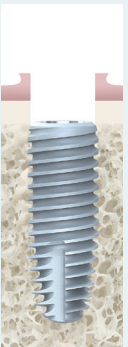


RACCOMANDATO

Impianto sommerso di **2 mm in posizione sottocrestale** per favorire la ricrescita ossea sul piano dell'impianto.


- Trapanare 2 mm più in profondità della lunghezza dell'impianto per un posizionamento subcrestale raccomandato di 2 mm.
- In caso di osso tipo D3, sottodimensionare di un diametro. Non sottodimensionare in profondità.
- In caso di osso di tipo D4, si raccomanda di utilizzare il Kontakt™ S +.

Ø
4.2 mm

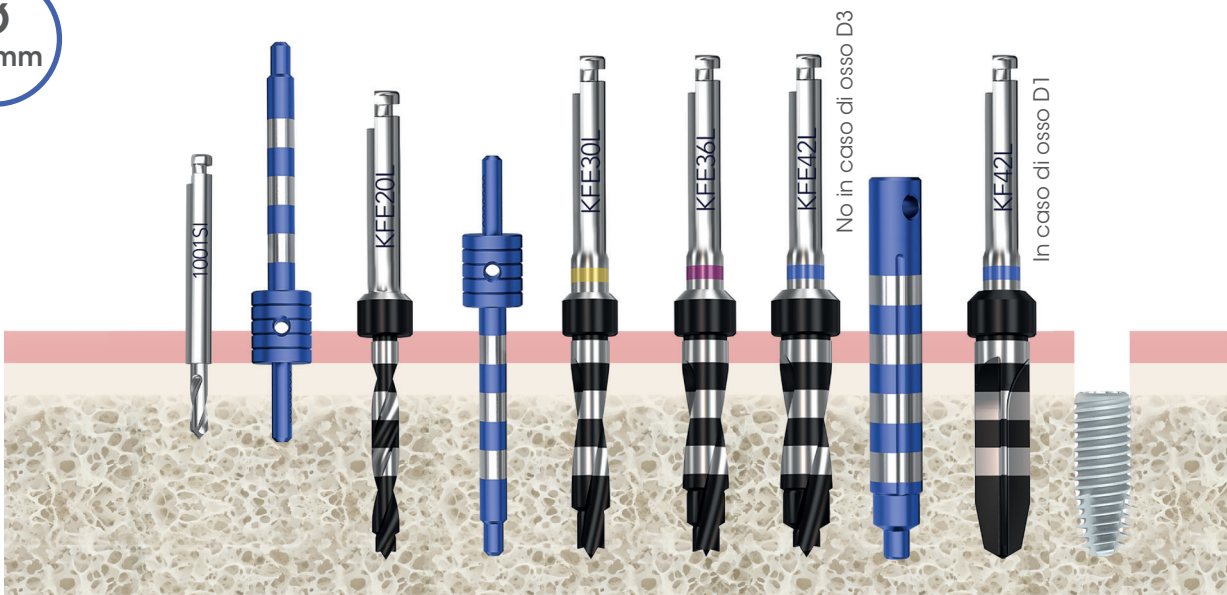


Esempio: K4212S

Ø
4.8 mm

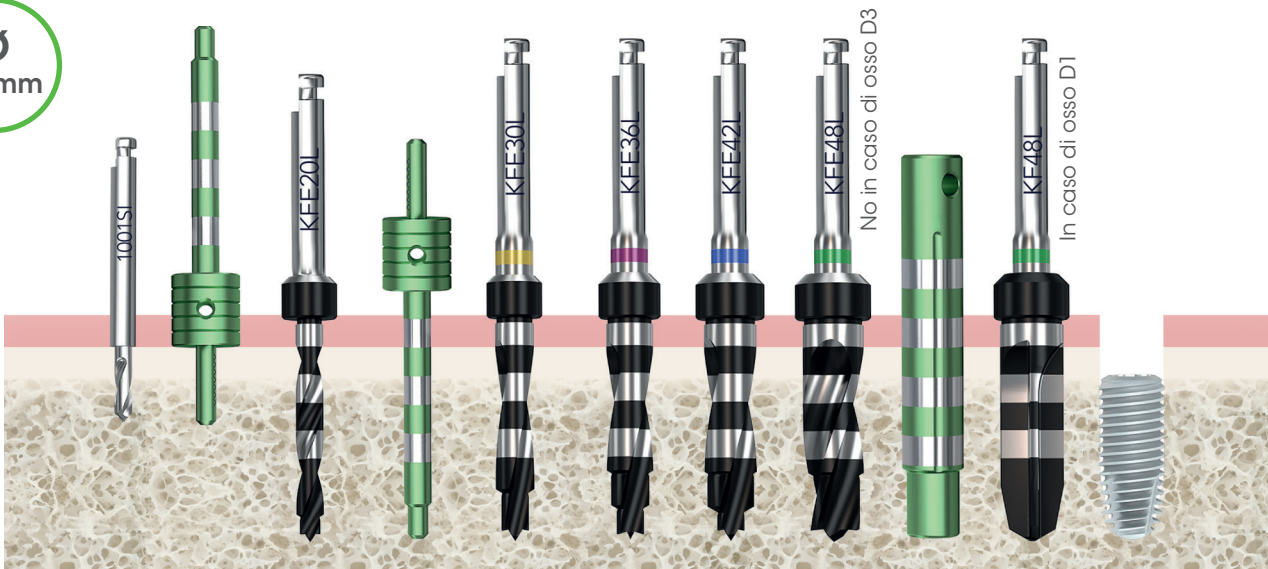

Esempio: K4812S

Ø
5.4 mm

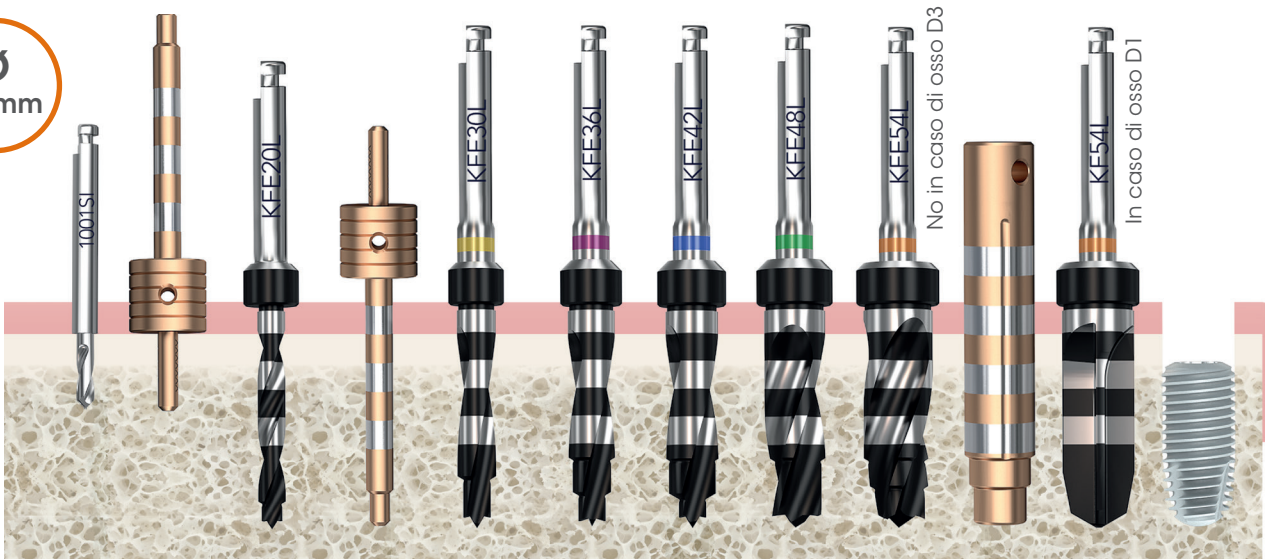

Esempio: K5412S

Ø
3.0 mm



Esempio: K3012S

Ø
3.6 mm



Esempio: K3612S

KONTACT™ S⁺



RACCOMANDATO

Impianto sommerso di **2mm in posizione sottocrestale** per favorire la ricrescita ossea sul piano dell'impianto.

- Trapanare 2 mm più in profondità della lunghezza dell'impianto per un posizionamento subcrestale raccomandato di 2 mm.
- In caso di osso tipo D4, favorire il diametro esterno più largo possibile, o sottodimensionare di un diametro. Non sottodimensionare in profondità.
- Le frese corticali sono da utilizzare a fine protocollo in caso di corticale densa. Possono anche essere utilizzate dopo il passaggio della fresa pilota, per visualizzare il diametro esterno dell'impianto.



Esempio: K4012-36S



Esempio: K4512-36S



RACCOMANDATO


➤ Diametri esterni **5.0 e 5.5 mm** raccomandati in caso di osso D4

Ø
Esterno
5.0 mm

Ø
Esterno
5.5 mm

Ø
4.2 mm

Ø
Esterno
4.5 mm

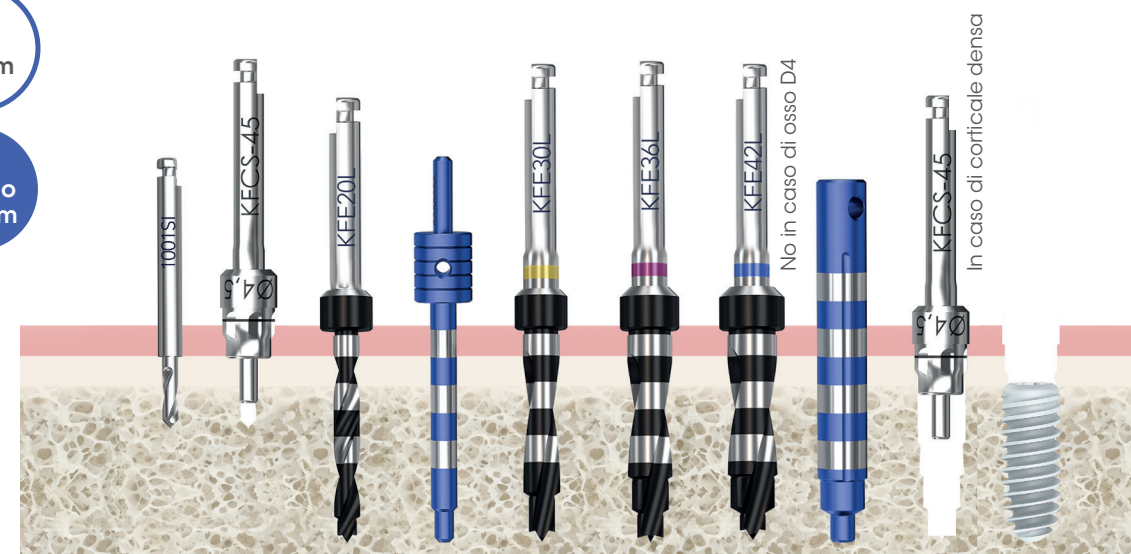

Esempio: K4512-42S

Ø
4.2 mm

Ø
Esterno
5.0 mm



Esempio: K5012-42S

Ø
4.2 mm

Ø
Esterno
5.5 mm



Esempio: K5512-42S

> Protocollo di foratura raccomandato in funzione della densità dell 'osso


Tipi di osso	Protocolli Kontakt™ S	Protocolli Kontakt™ S+
D1	Protocollo di posa standard con passaggio dell'alesatore.	Privilegiare il Kontakt™ S.
D2	Protocollo di posa standard.	Privilegiare il Kontakt™ S.
D3	Sottodimensionare di un diametro.	Protocollo di posa standard. In presenza di una corticale dura, utilizzare le frese corticali.
D4	Privilegiare il Kontakt™ S+.	Ø esterni 5.0 e 5.5 mm raccomandati O sottodimensionamento di una fresa al diametro per impianti Ø esterni 4.0 e 4.5 mm. In presenza di una corticale dura, utilizzare le frese corticali.

> Velocità di foratura raccomandate

Strumenti	Velocità di rotazione
Frese Ø 1.5 / Ø 2.0 mm	1500 giri al minuto
Frese gialle magenta e blu	1000 - 1200 giri al minuto
Frese verdi e arancioni	700 - 900 giri al minuto
Alesatore	200 giri al minuto
Fresa	200 giri al minuto
Impianto	15 giri al minuto

> Specifica dell'uso del drives di avvitamento per impianti

6 riferimenti angolari che rappresentano i vertici dell'accoppiamento. Si consiglia di posizionare uno dei riferimenti sulla direzione vestibolare.

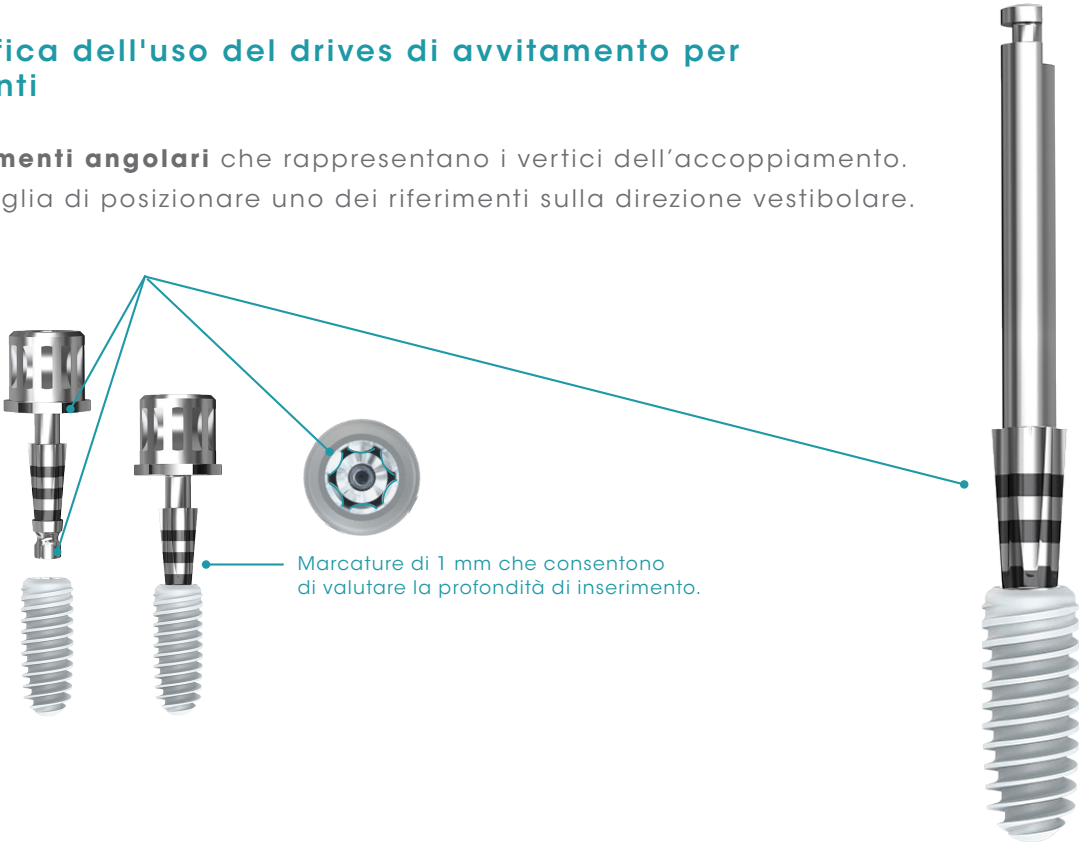


3. Kit di stop

> Kit di stop

Stop rimovibili e riutilizzabili per il controllo completo delle profondità di foratura.


Attenzione: gli stop non vengono utilizzati sulle frese opzionali di lunghezza 16 mm.

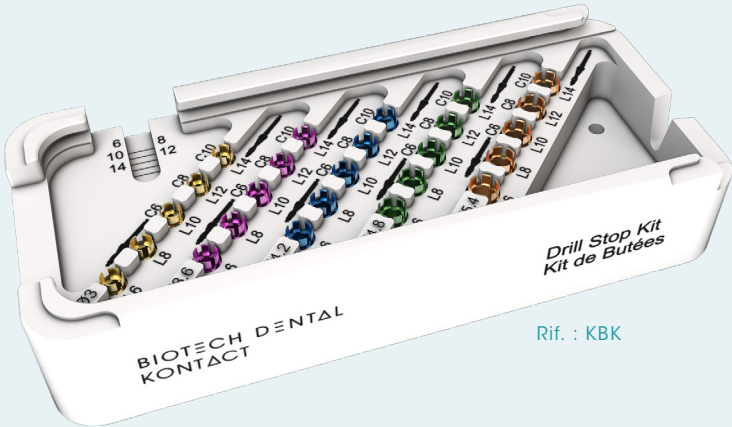

> Stop



> Stop sulla fresa

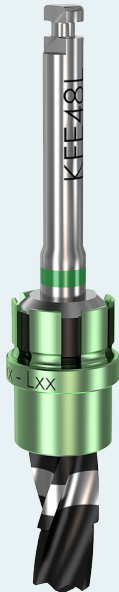

Frese lunghe

Codici	Diametri	Altezze
KB30L6	Ø 3.0 mm	6 mm
KB30L8		8 mm
KB30C6L10		10 mm
KB30C8L12		12 mm
KB30C10L14		14 mm
KB36L6	Ø 3.6 mm	6 mm
KB36L8		8 mm
KB36C6L10		10 mm
KB36C8L12		12 mm
KB36C10L14	Ø 4.2 mm	14 mm
KB42L6		6 mm
KB42L8		8 mm
KB42C6L10		10 mm
KB42C8L12		12 mm
KB42C10L14	Ø 4.8 mm	14 mm
KB48L6		6 mm
KB48L8		8 mm
KB48C6L10		10 mm
KB48C8L12		12 mm
KB48C10L14	Ø 5.4 mm	14 mm
KB54L6		6 mm
KB54L8		8 mm
KB54C6L10		10 mm
KB54C8L12		12 mm
KB54C10L14		14 mm


Frese corte

Codici	Diametri	Altezze
KB30C6L10	Ø 3.0 mm	6 mm
KB30C8L12		8 mm
KB30C10L14		10 mm
KB36C6L10	Ø 3.6 mm	6 mm
KB36C8L12		8 mm
KB36C10L14		10 mm
KB42C6L10	Ø 4.2 mm	6 mm
KB42C8L12		8 mm
KB42C10L14		10 mm
KB48C6L10	Ø 4.8 mm	6 mm
KB48C8L12		8 mm
KB48C10L14		10 mm
KB54C6L10	Ø 5.4 mm	6 mm
KB54C8L12		8 mm
KB54C10L14		10 mm

4. Sonda tessuti parodontali / Viti di guarigione

> Sonda tessuti parodontali

	Riferimento	Denominazione
	KJTP	Sonda tessuti parodontali

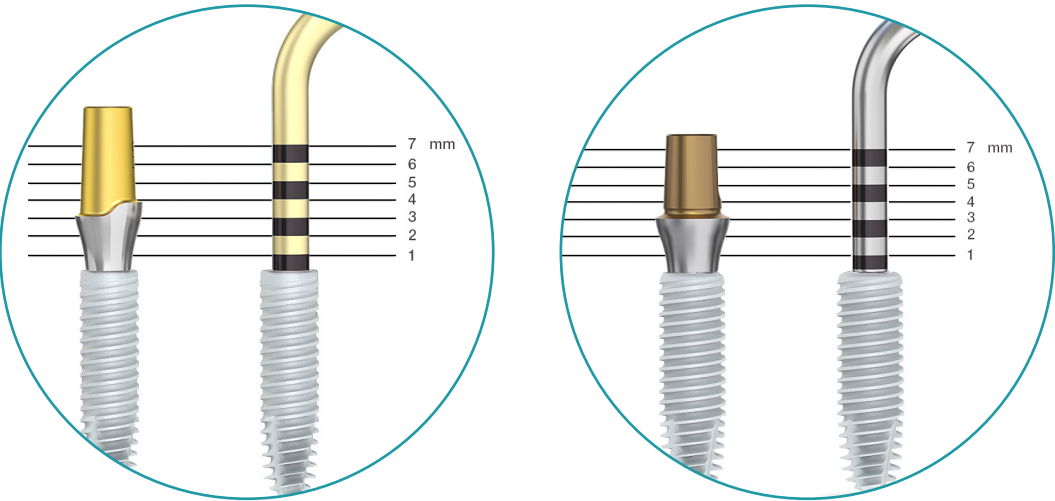


> Vite di guarigione

Altezza gengivale



Pulire accuratamente l'interno dell'impianto prima di posizionare la vite di guarigione.

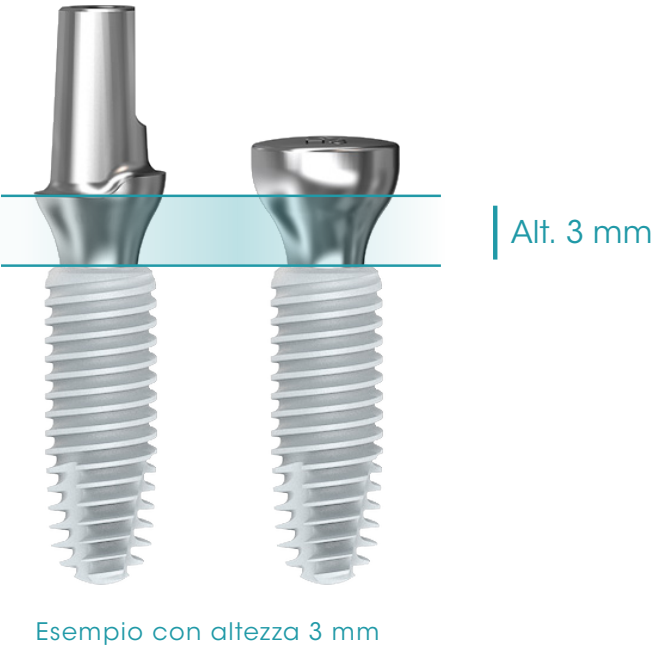

	Codici	Descrizioni	Diametri	Altezze
	K30VC	Viti di guarigione	Ø 3.0 mm	1.5 mm
	K30VC3			3 mm
	K30VC4			4 mm
	K30VC5			5 mm
	KVC401	Viti di guarigione	Ø 4.0 mm	1 mm
	KVC402			2 mm
	KVC403			3 mm
	KVC404			4 mm
	KVC405			5 mm
	KVC501	Viti di guarigione	Ø 5.0 mm	1 mm
	KVC502			2 mm
	KVC503			3 mm
	KVC504			4 mm
	KVC505			5 mm
	KVC652	Viti di guarigione	Ø 6.5 mm	2 mm
	KVC653			3 mm
	KVC654			4 mm
	KVC655			5 mm




Rif.: KVCK

Le viti di guarigione devono essere serrate a una **coppia massima di 10 N.cm.** (serraggio manuale consigliato).



3

INFORMAZIONI GENERALI

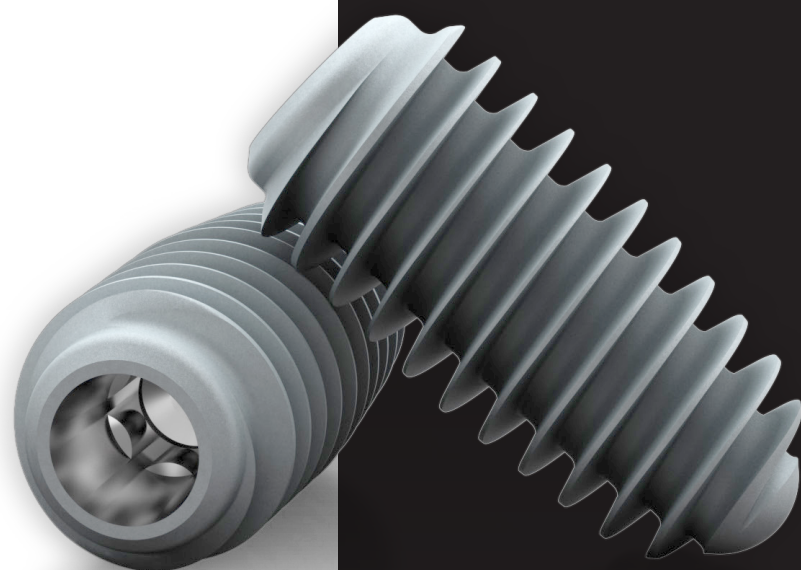

Per effettuare gli ordini, si prega di contattare il
nostro reparto di amministrazione delle vendite

Tel.: +39 089 9712666

E-mail: info@biotech-dental.it

Orari

09h00 - 18h00 (dal lunedì al venerdì)

Per gli ordini effettuati prima delle 14:00, possiamo garantire
la consegna per il giorno successivo (giorni lavorativi).

Hotline

Luca Zito: Responsabile linea implantare

Tel.: +39 388 8910163

E-mail: luca.zito@biotech-dental.it

Formazioni

Per fornire informazioni e presentare il nostro sistema, il centro di
formazione propone:

- Stage clinici
- Stage su protesi
- Giornate a tema

Per ulteriori informazioni sui nostri corsi, si prega di contattare:

PARIS

Biotech Dental Academy

36, Rue des Petits Champs
75002 Paris - Francia

Tel.: + 33 (0)6 26 30 40 46

E-mail: academy@biotech-dental.com

SALON-DE-PROVENCE

305, Allées de Craonne
13300 Salon-de-Provence, Francia
Tel.: + 33 (0)4 90 44 60 60



BIOTECH DENTAL
ITALIA

Biotech Dental Italia
Viale degli olmi, 14
84 134 Salerno - Italia

Tel.: +39 089 9712629
Fax: +39 089 9712666

info@biotech-dental.it
www.biotech-dental.com
www.biotech-dental.it



AENOR Cert. 73017

Biotech Dental - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon-de-Provence, Francia.

S.A.S con capitale 24 866 417 € - RCS Salon de Provence: 795 001 304 - SIRET: 795 001 304 00018 - N° IVA: FR 31 79 500 13 04.

Kontakt™ S/S+: prodotto da: Biotech Dental. Dispositivi medicali di classe I, IIa e IIb destinati all'implantologia dentale. CE0459.

Leggere attentamente le istruzioni sul foglietto illustrativo. Non rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Immagini non contrattuali.

Smaltire con i rifiuti speciali. Stampa eseguita da VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas - Francia.