



PROTESI TOTALE

REALIZZAZIONE DI UNA PROTESI PROVVISORIA A CARICO IMMEDIATO

CON IL SISTEMA ISO-POST
METODICA PERFECTLINK



PROTOCOLLO



BIOTECH DENTAL
ITALIA




FASE 1

Studio implanto-protesico preliminare



1

Valutazione della protesi del paziente. **Riutilizzo** della protesi preesistente o **realizzazione** di una nuova protesi. Reperi radiografici in corrispondenza dell'asse dei denti.

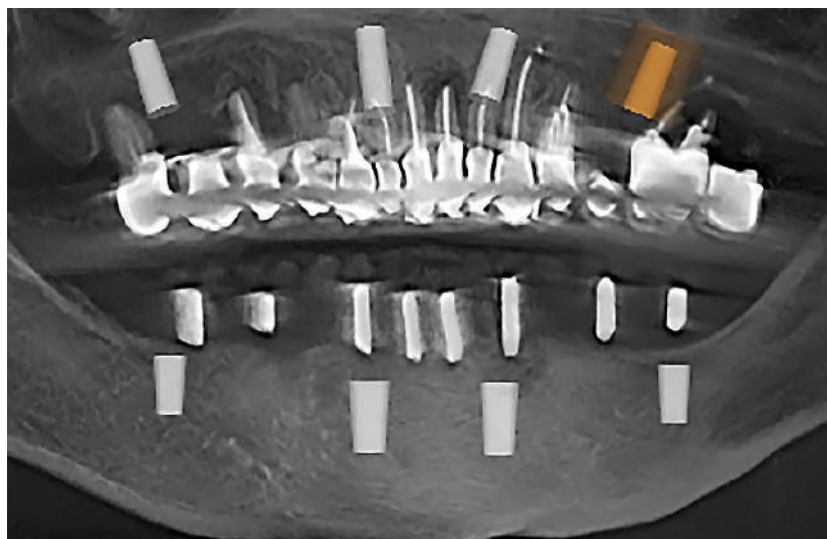

2

Radiografia 3D con la protesi provvisoria in bocca, pianificazione implantare.


FASE 2

Inserimento degli impianti



1

Realizzazione di fori nella **protesi provvisoria** in corrispondenza dell'emergenza stabilita degli impianti.

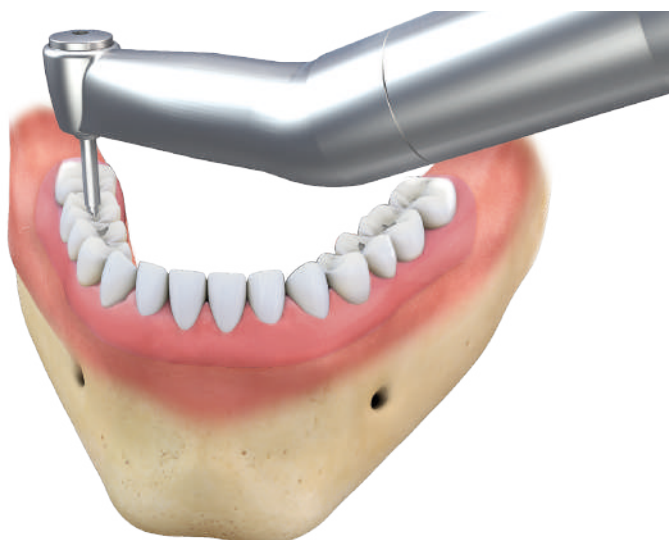

2

Trasferimento attraverso **puntamento** di queste emergenze sulla mucosa.



3


Inserimento degli impianti
(ricercare un corretto parallelismo e una posizione sottocrestale).

Posizionamento dei monconi




1

Scelta del moncone di riferimento (preferibilmente anteriore e dritto) con l'aiuto dei perni prova Iso-Post.

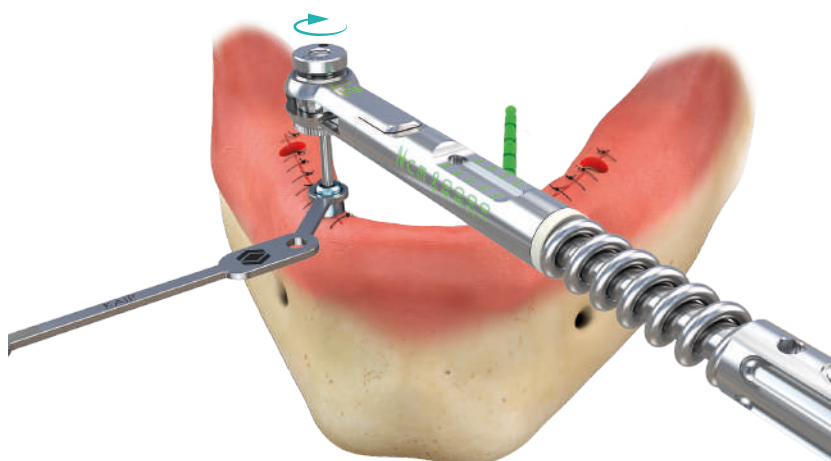


2

Avvitamento del moncone di riferimento Iso-Post ed inserimento del suo pin di parallelismo.

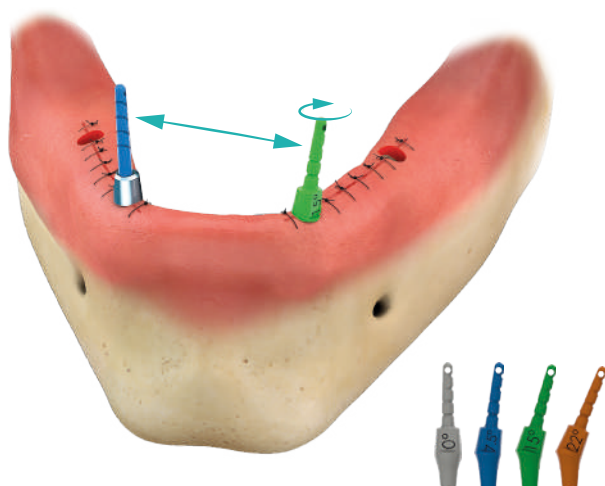


3

Ruotare il perno prova del secondo moncone Iso-Post fino a raggiungere il parallelismo con il moncone di riferimento. Se ciò non è possibile, utilizzare un perno prova con un'angolazione maggiore.

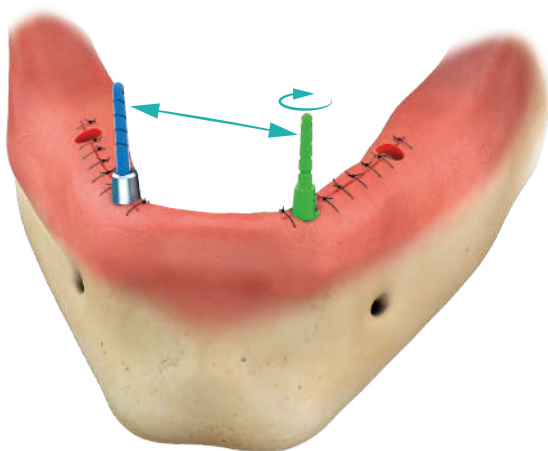


4

Una volta raggiunto il parallelismo, utilizzare un moncone Iso-Post corrispondente al perno prova.

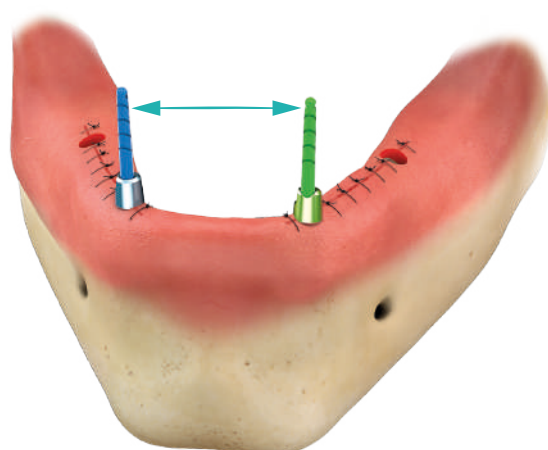


5

Inserire il moncone corrispondente al perno prova scelto con il suo pin di parallelismo. La rotazione del secondo moncone permette di correggere il parallelismo con il moncone di riferimento.

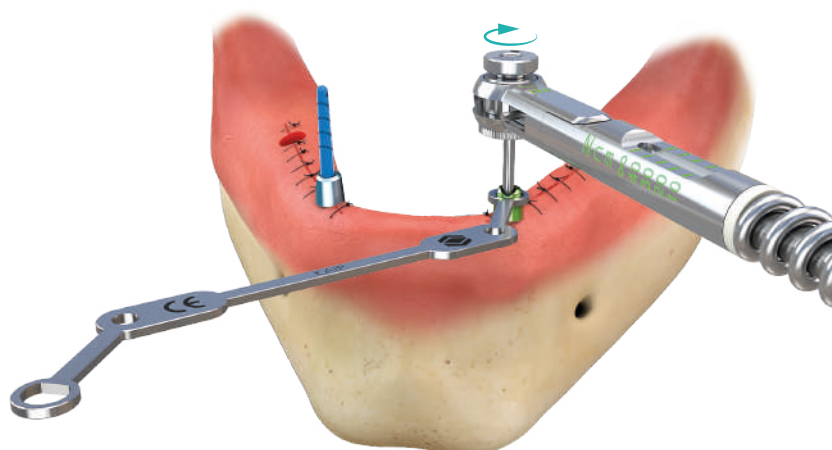

6


Il moncone, mantenuto in posizione dalla chiave per il contro serraggio, viene avvitato.

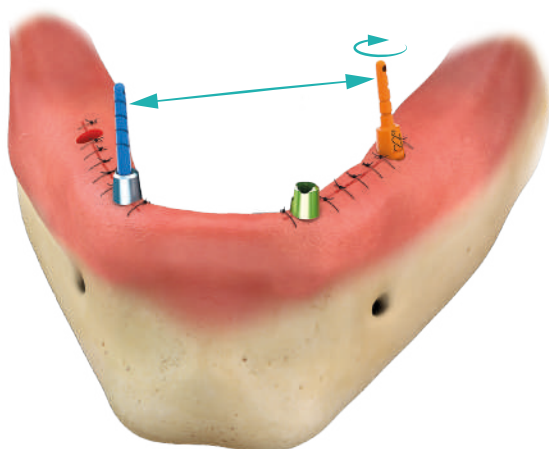

7


Il terzo perno prova viene inserito come i precedenti, parallelo allo stesso moncone di riferimento.

Scegliere come terzo moncone quello controlaterale rispetto al moncone di riferimento.

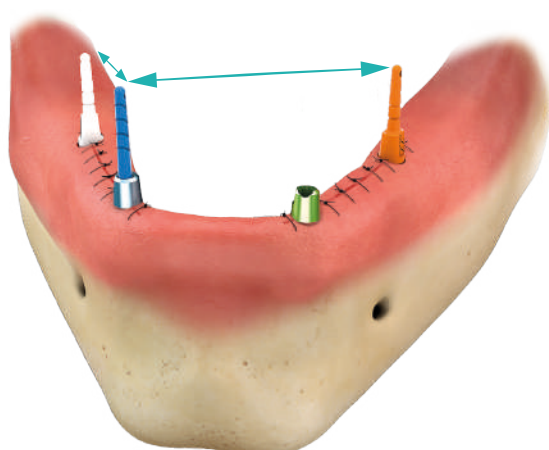


8

L'ultimo perno prova viene inserito come i precedenti, parallelo allo stesso moncone di riferimento.

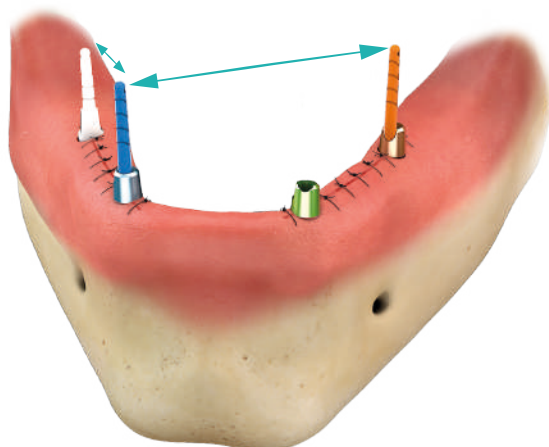

9

Parallelismo del terzo moncone con l'aiuto del pin di parallelismo.

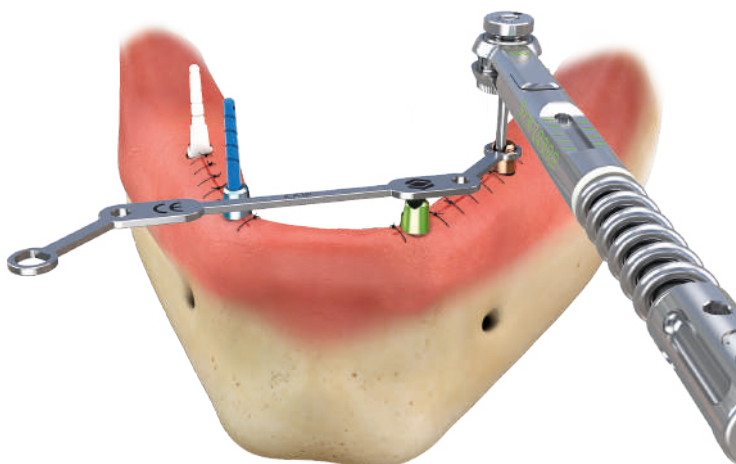

10

Avvitamento del terzo moncone.




11

Stessa sequenza per il quarto moncone con le fasi di:


- Posizionamento del perno prova,
- Ricerca del parallelismo,
- Posizionamento del pin di parallelismo,
- Avvitamento del quarto moncone.

Adattamento della protesi provvisoria

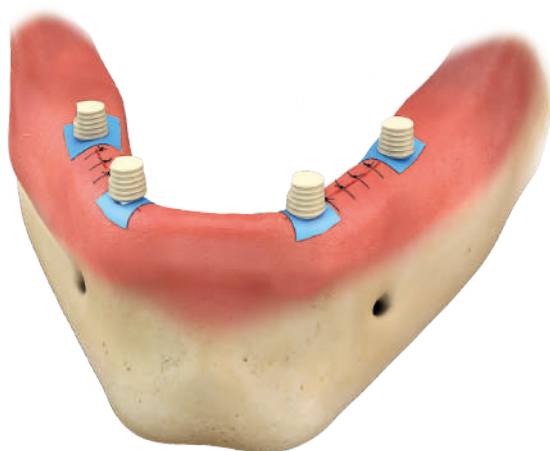

1

Posizionare della diga di gomma per proteggere le suture e inserire le cappette in PMMA (polimetilmetacrilato).

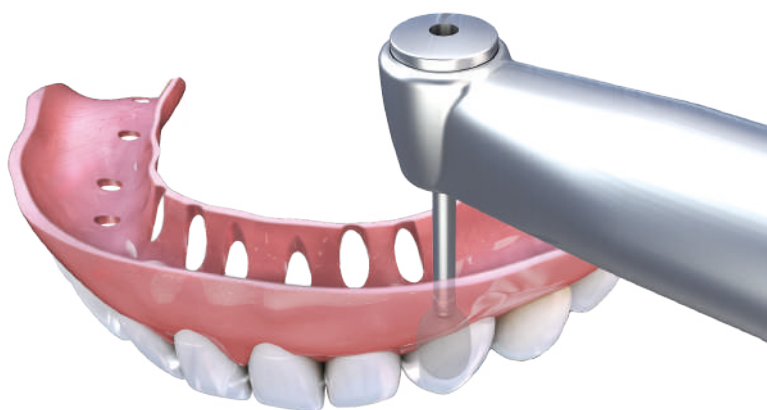

2

Allargare i fori di repere nella protesi per permettere il suo inserimento sulle cappette in PMMA (Rif. KCPIP).



3

Controllare la passività dell'inserzione e il rispetto dell'occlusione centrica. Bloccare le cappette alla protesi con resina autopolimerizzabile. Durante questa fase controllare di aver rispettato l'occlusione centrica.



4

Rifinitura

- Riempimento dei difetti,
- Eliminare le flange inutili per l'estetica o per la fonazione.



5

- Prevedere delle aree accessibili per la pulizia con scovolini su ogni lato dei monconi,
- Lucidatura.



Gamma Iso-Post

Monconi:

La gamma comprende monconi dritti e angolati (7.5° ; 15° ; 22°) con diverse altezze gengivali (1.5 ; 3 ; 5 mm).

	Descrizione	Angolazione	Altezza	Codice
	Monconi telescopici Iso-Post dritti	0°	1.5 mm	KPIP150
			3 mm	KPIP300
			5 mm	KPIP500
	Monconi telescopici Iso-Post angolati	7.5°	1.5 mm	KPIPA75150
			3 mm	KPIPA75300
			5 mm	KPIPA75500
	Monconi telescopici Iso-Post angolati	15°	1.5 mm	KPIPA150150
			3 mm	KPIPA150300
			5 mm	KPIPA150500
	Monconi telescopici Iso-Post angolati	22°	1.5 mm	KPIPA220150
			3 mm	150220300
			5 mm	150220500
	Analogo dei monconi	0°		KDIP
		15°		KDIP150

Pin di parallelismo:

Permettono di posizionare in modo parallelo i monconi, in bocca o sul modello.

	Descrizione	Angolazione	Codice
	Pin di parallelismo	0°	KJIP
		7.5°	KJIP75
		15°	KJIP50
		22°	KJIP220

Per semplificare la procedura, raccomandiamo di parallelizzare i monconi fuori dal cavo orale.

Perni prova:

Permettono di scegliere i monconi e di testare il loro parallelismo, in bocca o sul modello.

	Descrizione	Angolazione	Altezza tras mucosa	Codice
	Perni prova	0°	1.5 mm	KPIP150JF
			3 mm	KPIP300JF
			5 mm	KPIP500JF
	Perni prova	7.5°	1.5 mm	KPIPA75150JF
			3 mm	KPIPA75300JF
			5 mm	KPIPA75500JF
	Perni prova	15°	1.5 mm	KPIPA150150JF
			3 mm	KPIPA150300JF
			5 mm	KPIPA150500JF
	Perni prova	22°	1.5 mm	KPIPA220150JF
			3 mm	KPIPA220300JF
			5 mm	KPIPA220500JF

Cappetta	Descrizione	Indicazione	Codice
	Cappetta in titanio non indicizzata	Lavorazione molto precisa, con ritenzioni esterne per la resina o i materiali da impronta densi. Utilizzate principalmente per la stabilizzazione di protesi in resina, totali o parziali, provvisorie a lungo termine o definitive, occasionalmente per le impronte su impianti multipli.	KCTIP
	Cappetta in titanio non indicizzata da incollaggio	Lavorazione molto precisa, con ritenzioni minime, è utilizzata incollata ad armature metalliche o ceramiche per protesi avvitate in ceramica, metallo-ceramica, nano-ceramica o protesi in metallo-ceramica singole, parziali o totali.	KCTIPC
	Cappetta in Oro palladiato	Adatta a tutti i tipi di restauro, utilizzata soprattutto come ritenzione per protesi rimovibili.	KCOIP
	Cappetta provvisoria (PMMA)	Cappetta indicizzata per la presa dell'impronta	KCPIP
	Cappetta per la presa dell'impronta (POM)	Cappetta indicizzata per la presa dell'impronta	KCCIP

Strumentario	Descrizione	Indicazione	Codice
	Chiave per il « controserraggio » Iso-post	Questa chiave permette di bloccare il moncone durante l'avvitamento per mantenere esattamente l'inclinazione scelta.	KAIP
	Estrattore di monconi	Per estrarre facilmente i monconi Iso-Post, vi raccomandiamo di utilizzare l'estrattore di monconi Kontakt® (l'utilizzo di una pinza è sconsigliato).	KEX
	Cacciavite protesico	I monconi vengono avvitati con un cacciavite protesico	1032
	Cappetta di parallelismo del moncone Iso-Post	La cappetta permette di parallelizzare i monconi. Si inserisce sul cono del moncone ed è finestrata per permettere di inserire il cacciavite e di avvitare il moncone direttamente con la cappetta in posizione.	KCPARIP



Biotech Dental Italia
Viale degli olmi, 14
84 134 Salerno - ITALIA



Tel.: +39 089 9712629
Fax: +39 089 9712666



info@biotech-dental.it



www.biotech-dental.it



UPPERSIDE

133, Boulevard Haussmann
75008 Paris - FRANCIA

contact@groupe-upperside.com

www.groupe-upperside.com



AFNOR Cert. 73017

KON-PT-3-IT_Rév.00_02/2019



**BIOTECH DENTAL
ITALIA**

Fabbricato da Biotech Dental - 305, Allées de Craonne - 13300 Salon-de-Provence - Francia.
Una società francese di diritto francese con un capitale di 24 866 417 €. Registro commerciale Salon de Provence: 795 001 304 - SIRET: 795 001 304 00018
Numero IVA: FR 31 79 500 13 04. Dispositivi medicali di classe I, IIa e IIb destinati all'implantologia dentale. CE0459. Leggere attentamente le istruzioni sul foglietto illustrativo. Immagini non contrattuali.
Smaltire esclusivamente nei rifiuti speciali. Stampa eseguita da VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas - Francia.