



CORONA SINGOLA AVVITATA

PROTOCOLLO DI INSERIMENTO DEL MONCONE UNI-POST




PROTOCOLLO



BIOTECH DENTAL
ITALIA

SCELTA E POSIZIONAMENTO DEL MONCONE UNI-POST

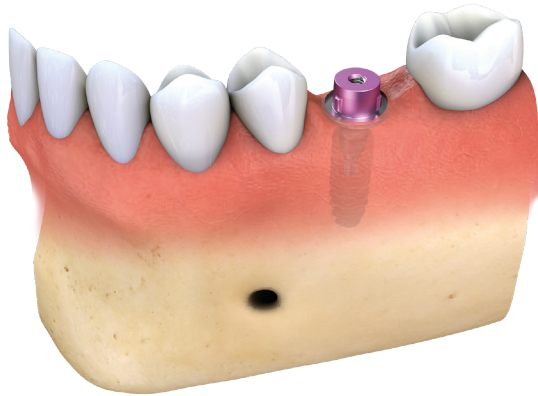

1


Scegliere un moncone Uni-Post (diametro ed altezza) in funzione del dente da sostituire e dell'altezza gengivale. Avvitare il moncone Uni-Post a 20 N.cm con un cacciavite KTP09.



2

Posizionare un tappo di guarigione adatto. Avvitare manualmente (10 N.cm).

REALIZZAZIONE DELLA CORONA SU MONCONE UNI-POST

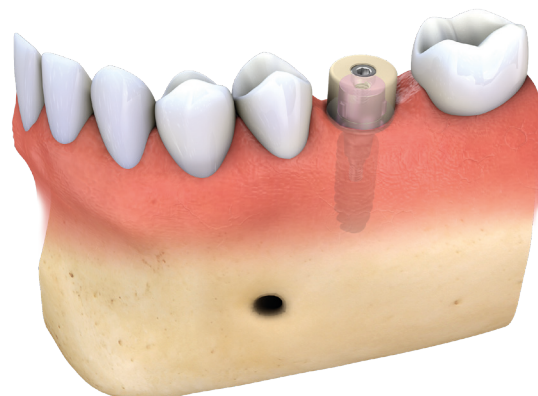

1


Svitare il tappo di guarigione.

..... IMPRONTA CON PORTAIMPRONTE NON FORATO



2a


Posizionare il transfert Pop-Up con il plastic-cap (portaimpronte non forato) e procedere alla presa dell'impronta.

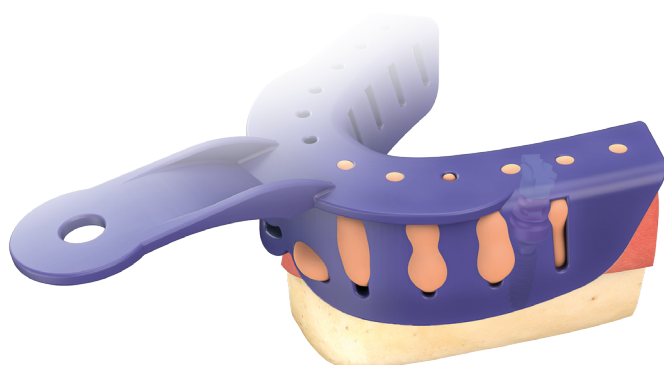

3a

Dopo l'indurimento completo del materiale, estrarre il portaimpronte dalla bocca del paziente. Il plastic-cap rimane nell'impronta. Svitare il transfer e inviare tutto al laboratorio insieme all'impronta.

IN LABORATORIO

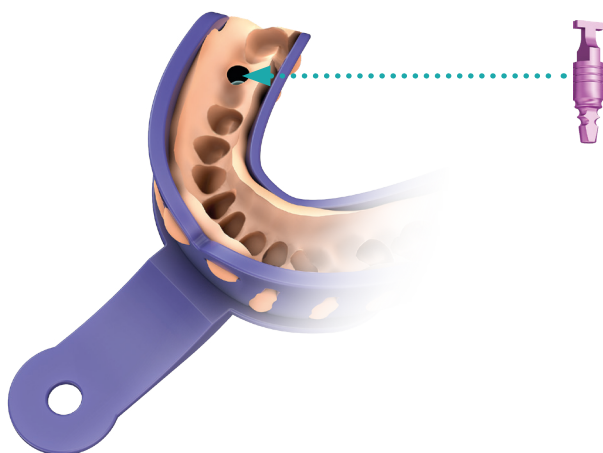

4a

Connettere l'analogo del moncone Uni-Post al transfert Pop-up. Reinserire il tutto nel portaimpronte fino ad incastrarlo nel plastic-cap. Procedere a colare il modello in gesso.



..... IMPRONTA CON PORTAIMPRONTE FORATO



2b


Posizionare il transfer Pick-Up (portaimpronte forato) e procedere alla presa dell'impronta.



3b

Forare il portaimpronte in corrispondenza del transfer in modo che questo possa fuoriuscire. Dopo l'indurimento completo del materiale d'impronta, svitare completamente la vite del transfer nel cavo orale attraverso il portaimpronte ed estrarre quest'ultimo. Inviare tutto al laboratorio.


IN LABORATORIO

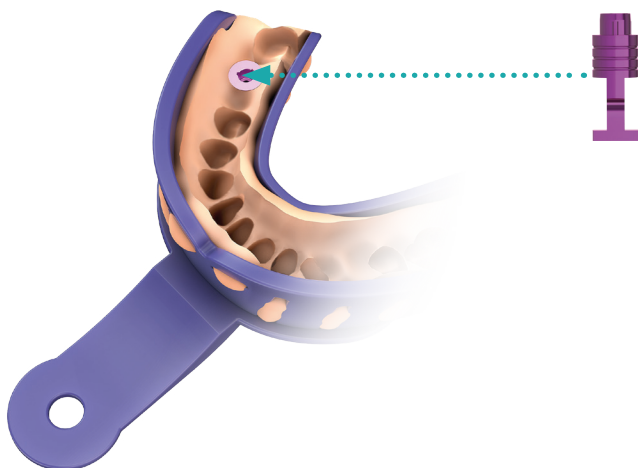

4b

Connettere l'analogo al transfer Pick-Up rimasto nel portaimpronte. Procedere a colare il modello in gesso.

— REALIZZAZIONE DI UNA CORONA PROVVISORIA —

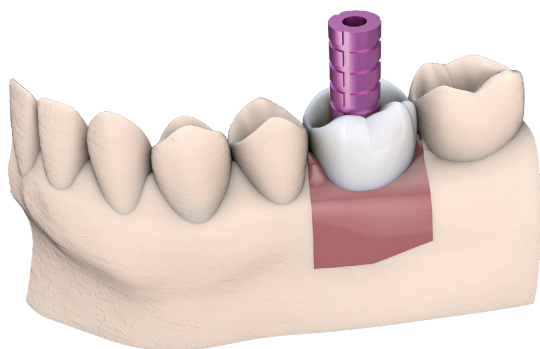

1


Scegliere il cilindro in Titanio o quello provvisorio in PEEK (Polietero etere chetone) adatto al diametro del moncone. Modificare il cilindro alla giusta altezza in funzione dell'occlusione. Procedere all'aggiunta della resina.



2


Avvitare la corona provvisoria sul moncone Uni-Post. Serrare a 20 N.cm. Chiudere il foro di passaggio per la vite.

— FASI DI LABORATORIO —

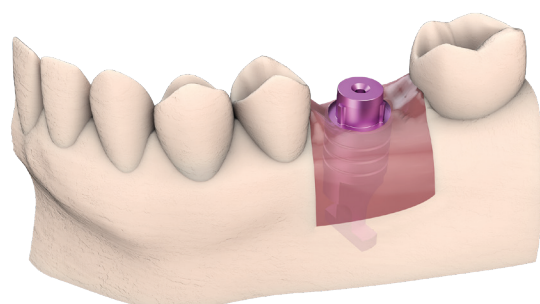


1

Procedere a colare il modello in gesso e realizzare la finta gengiva in silicone.

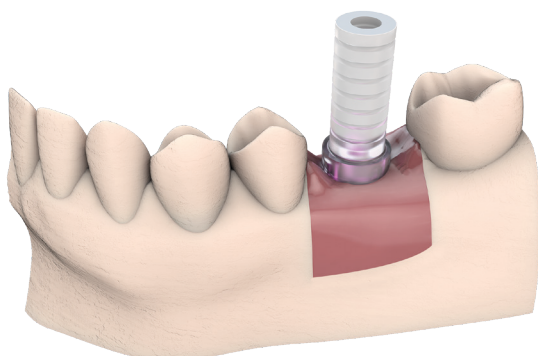

2

Scegliere il cilindro calcinabile adatto al diametro del moncone.

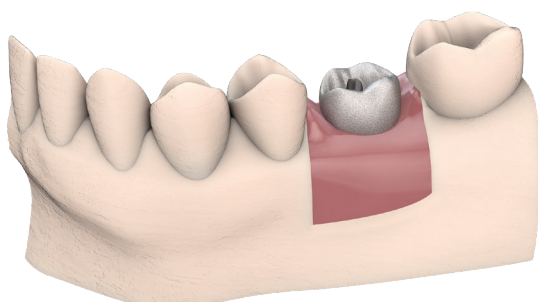

3

Realizzare la cappetta metallica.

INSERIMENTO DELLA CORONA DEFINITIVA



4

Procedere alla stratificazione della ceramica e alla rifinitura finale della corona. Avvitare la corona nel cavo orale sul moncone Uni-Post. Chiudere a 20 N.cm. Chiudere il foro di passaggio per la vite.

Gamma Uni-Post

Monconi indicizzati Uni-Post*

	Codice	Descrizione	Diametro	Altezza	Lunghezza
	KPV401	Moncone indicizzato Uni-Post	Ø 4 mm	1 mm	
	KPV402			2 mm	
	KPV403			3 mm	
	KPV404			4 mm	
	KPV405			5 mm	
	KPV501	Moncone indicizzato Uni-Post	Ø 5 mm	1 mm	
	KPV502			2 mm	
	KPV503			3 mm	
	KPV504			4 mm	
	KPV505			5 mm	
	KPV652	Moncone indicizzato Uni-Post	Ø 6.5 mm	2 mm	
	KPV653			3 mm	
	KPV654			4 mm	
	KPV655			5 mm	
	KTP09S	Cacciavite esagonale Ø piccolo corto			8 mm
	KTP09	Cacciavite esagonale Ø piccolo			12 mm
	KTP09L	Cacciavite esagonale Ø piccolo lungo			18 mm
	KTP09CAS	Cacciavite esagonale Ø piccolo corto per contrangolo			20 mm
	KTP09CA	Cacciavite esagonale Ø piccolo per contrangolo			24.5 mm
	KTP09CAL	Cacciavite esagonale Ø piccolo lungo per contrangolo			30 mm

*Attenzione: compatibile con tutti i diametri degli impianti Kontakt® e Kontakt S® ad eccezione del diametro 3 mm.

Tappi di guarigione per monconi Uni-Post

	Codice	Descrizione	Diametro	Altezza
	KPVCC404	Tappi di guarigione per monconi indicizzati Uni-Post	Ø 4 mm	4 mm
	KPVCC504		Ø 5 mm	
	KPVCC654		Ø 6.5 mm	
	KPVCC406	Tappi di guarigione per monconi indicizzati Uni-Post	Ø 4 mm	6 mm
	KPVCC506		Ø 5 mm	
	KPVCC656		Ø 6.5 mm	

BIOTECH DENTAL
KONTACT




Gamma Uni-Post

Transfer per monconi Uni-Post

	Codice	Descrizione	Diametro
	KDPV40	Analogo dei monconi indicizzati Uni-Post	Ø 4 mm
	KDPV50		Ø 5 mm
	KDPV65		Ø 6.5 mm
	KPVTPI40	Transfer Pick-up per monconi indicizzati Uni-Post + 2 viti KPVTPI40(L)	Ø 4 mm
	KPVTPI50	Transfer Pick-up per monconi indicizzati Uni-Post + 2 viti KPVTPI50(L)	Ø 5 mm
	KPVTPI65	Transfer Pick-up per monconi indicizzati Uni-Post + 2 viti KPVTPI65(L)	Ø 6.5 mm
	KPVTPO40	Transfer Pop-up per monconi indicizzati Uni-Post + vite KPVTPO40 + Plastic-cap KCAP	Ø 4 mm
	KPVTPO50	Transfer Pop-up per monconi indicizzati Uni-Post + vite KPVTPO50 + Plastic-cap KCAP	Ø 5 mm
	KPVTPO65	Transfer Pop-up per monconi indicizzati Uni-Post + vite KPVTPO65 + Plastic-cap KCAP	Ø 6.5 mm



Cilindri per monconi Uni-Post

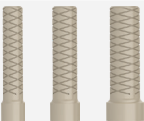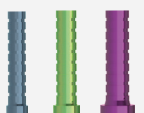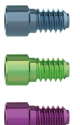	Codice	Descrizione	Diametro
	KPVPP40	Cilindro provvisorio in PEEK per monconi indicizzati Uni-Post + vite KPWW40	Ø 4 mm
	KPVPP50	Cilindro provvisorio in PEEK per monconi indicizzati Uni-Post + vite KPWW50	Ø 5 mm
	KPVPP65	Cilindro provvisorio in PEEK per monconi indicizzati Uni-Post + vite KPWW65	Ø 6.5 mm
	KPVGC40	Cilindro calcinabile per monconi indicizzati Uni-Post + vite KPWW40	Ø 4 mm
	KPVGC50	Cilindro calcinabile per monconi indicizzati Uni-Post + vite KPWW50	Ø 5 mm
	KPVGC65	Cilindro calcinabile per monconi indicizzati Uni-Post + vite KPWW65	Ø 6.5 mm
	KPVGT40	Cilindro in titanio per monconi indicizzati Uni-Post + vite KPWW40	Ø 4 mm
	KPVGT50	Cilindro in titanio per monconi indicizzati Uni-Post + vite KPWW50	Ø 5 mm
	KPVGT65	Cilindro in titanio per monconi indicizzati Uni-Post + vite KPWW65	Ø 6.5 mm
	KPWW40	Vite per cilindro per monconi indicizzati Uni-Post	Ø 4 mm
	KPWW50		Ø 5 mm
	KPWW65		Ø 6.5 mm



NOTE

10 |

NOTE



Biotech Dental Italia
Viale degli olmi, 14
84 134 Salerno - ITALIA



Tel.: +39 089 9712629
Fax: +39 089 9712666



info@biotech-dental.it



www.biotech-dental.it



UPPERSIDE

133, Boulevard Haussmann
75008 Paris - FRANCIA

contact@groupe-upperside.com

www.groupe-upperside.com



AFNOR Cert. 73017

KON-PT-4-IT_Rév.00_02/2019



BIOTECH DENTAL
ITALIA

Fabbricato da Biotech Dental - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon-de-Provence - Francia.
Una società francese di diritto francese con un capitale di 24 866 417 €. Registro commerciale Salon de Provence: 795 001 304 - SIRET: 795 001 304 00018
Numero IVA : FR 31 79 500 13 04. Dispositivi medicali di classe I, IIa e IIb destinati all'implantologia dentale. CE0459. Leggere attentamente le istruzioni sul foglietto illustrativo. Immagini non contrattuali.
Smaltire esclusivamente nei rifiuti speciali. Stampa eseguita da VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas - Francia.